




Rollz Motion Electric

DK - Brugervejledning

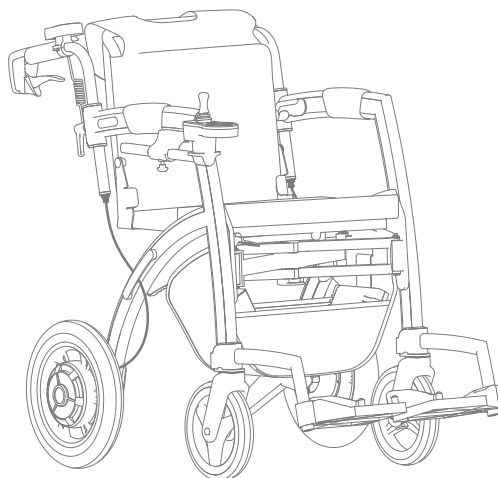

DK - Brugervejledning

5

Find manualer på andre sprog på
www.rollz.com.

Kontaktinformation på distributører pr. land:

Belgium & France

Mobio

003293287723

www.mobio.be & www.mobio.fr

Germany & Austria

Saljol

+49(0)8141317740

www.saljol.de

Switzerland

PROMEFA AG

+41448729779

www.promefa.ch

The Netherlands

Rollz International BV

+31 20 362 2010

www.rollz.nl

BRUGERVEJLEDNING

Elektrisk kombineret rollator og transportstol i én

rollz motion electric

DK

Rollz® International BV – Rollz Motion Electric

© Copyright 2023 Rollz® International BV

Dette er en oversættelse af den originale engelske brugermanual til Rollz Motion Electric. Denne brugervejledning er baseret på den information, der var tilgængelig på det tidspunkt, den blev oprettet. Det er muligt, at oplysningerne i dette dokument vil blive ændret. Det købte produkt kan være lidt anderledes end det, der er beskrevet i denne brugervejledning.

Du kan downloade den seneste manual på www.rollz.com. For at holde dig opdateret om den nyeste information reviderer vi www.rollz.com regelmæssigt. Rollz® International BV kan ikke holdes ansvarlig for tekniske fejl eller mangler i denne manual.

CE-overensstemmelse


Produktet opfylder kravene i EU-direktiv 93/42 EEC for medicinsk udstyr. Baseret på klassificeringsreglerne angivet i bilag IX til dette direktiv, er produktet klassificeret i klasse I. Overensstemmelseserklæringen er lavet på Rollz® International BV's eget ansvar baseret på bilag VII til dette direktiv.

Internationale standarder

Rollz Motion Electric er certificeret som rollator i henhold til ISO standard 11199-2:2005. Rollz Motion Electric er også certificeret som kørestol i henhold til ISO standard 7176-8: 2014 (Kor. 2015-09). Rollz Motion Electric er certificeret som en klasse A elektrisk kørestol i overensstemmelse med ISO 12184:2014.

**rollz motion
electric**

Max 100 kg

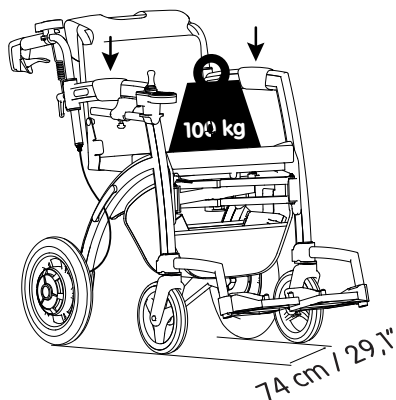

Figur 1: Rollz Motion Electric bredde og max. belastning.

INDHOLD

Før du starter	10
Vigtig information	10
Sikkerhedsinstruktioner	11
Advarsler	12
Uegnede omstændigheder	13
Elektromagnetisk interferens	14
Hvem kan have gavn af dette produkt	14
Hvem bør ikke bruge Rollz Motion Electric (kontraindikation)	15
Genbrug	15
 Udpakning	 16
Tjek om din levering er komplet	16
Montering af skubbestøtten	16
Montering af joystick-controlleren	17
Montering af 3-i-1 holderen	17
Opladning af Rollz Motion Electric	18
Advarsler	19
Genbrug af emballagemateriale	19
 Brug som rollator	 20
Hvad passer hvor?	20
Udfoldning og sammenfoldning	21
Transport	22
Justering af højden for korrekt kropsholdning	23
Gå med Rollz Motion Electric - som rollator	25
Betjening af bremsene	26
Hvile på Rollz Motion Electric	27
Brug af tasken	27
At gå over tærskler og kantsten	27
 Fra rollator til el-kørestol	 28
Hvad passer hvor på Rollz Motion Electric	29
Montering af Rollz kørestolspakke	30
Brug af Rollz kørestolspakke	31
Indstilling af fodstøtter (kun én gang)	33
Indstilling af ryglænet (kun én gang)	35

Ilægning af kørestolspakken	35
Fjernelse af kørestolspakken	36
Sikkerhedsinstruktioner	36

Anvendes som elektrisk kørestol - med en person, der skubber

Matcher dit tempo	37
Brug af det elektriske støttesystem - med en person, der skubber	37
Power assist-tilstand	38
Konstant power assist	38
Auto-power assist tilstand	38
Anti-fald	38
Gå over en kantsten	39
At komme sikkert af fortovet	39
Skråninger	40

Brug af det elektriske støttesystem - mens du sidder i den elektriske kørestol

Horn	41
Bakning	42
Gå over en kantsten	42
At komme sikkert af fortovet	42
Skråninger	43
Forflytninger (op- og udstigning af kørestolen)	43
Siddestilling	43

Specifikationer for Rollz Motion Electric

Produkt Specifikationer	44
Oplysninger om materialet	44
Produktmål	45
Ergonomi dimensioner	47
Tekniske detaljer	47

Fejlkoder og løsninger

Fejlkodeliste	48
---------------	----

Tilbehør

Vedligeholdelse**49**

Rengøring/desinfektion	49
Frakobling af batteriet	50
Gentilslutning af batteriet	51
Opbevaring af Rollz Motion Electric	52
Batterivedligeholdelse (dagligt)	52
Kabler og forbindelser (ugentlig)	52
Motorer (hver måned)	53
Push-controller og joystick-controller (hver 3. måned)	53
Vask sædebetræk	53
Bremseydelse (dagligt)	54
Justering af bremsen	54
Bremsejusteringer i toppen af bremsekablet	54
Bremsejusteringer i bunden af bremsekablet	55
Pumpning af de pneumatiske dæk (ca. hver måned)	56
Flade dæk	57
Udskiftning af dele	57

Garanti**57**

Garantibestemmelser	57
Registrer din Rollz Motion Electric	58

Kontakt**59**

FØR DU STARTER

Tillykke med din nye Rollz Motion Electric. Rollz International BV har lavet denne manual, så du kan bruge din rollator og elektriske kørestol i én på den sikreste og mest bekvemme måde. Hvis du er usikker på advarslerne eller instruktionerne nævnt i denne manual, bedes du kontakte din leverandør for at få afklaring.

Vi håber, du vil nyde brugen af din Rollz Motion Electric.

Vigtig information

- Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du begynder at bruge produktet, og gem dem til fremtidig reference.
- Denne manual er skrevet til Rollz Motion Electric (introduceret i 2022).
- Risiker ikke din og andres sikkerhed ved at bruge produktet forkert.
- I denne manual taler vi om det elektriske støttesystem, dette system indeholder den joystick-kontrollerede elektriske støtte og skubbestøtten, som styrer motorerne i hjulene.
- Farverne på Rollz Motion Electric-delene kan falme en smule, når de udsættes for sollys.
- Udsæt ikke produktet for temperaturer under -5°C / 23°F og højere end 45°C / 113°F , da dette kan forårsage skade på nogle komponenter og påvirke deres ydeevne.
- Rollz Motion Electric indeholder elektroniske komponenter. Undgå derfor at gøre rollatoren våd. Brug den ikke udendørs i kraftig regn.
- Brug kun den medfølgende oplader til at oplade Rollz Motion Electric.
- Brug kun originalt Rollz-tilbehør. Brugen af ikke-godkendt tilbehør kan være usikkert og vil ugyldiggøre garantien.
- Brug kun originale Rollz International BV godkendte dele til reparationer eller udskiftninger foretaget af en autoriseret forhandler. Brug af andre dele kan være usikker og vil ugyldiggøre garantien.
- Skader på grund af overbelastning af produktet eller forkert foldning og udfoldning gør ikke kun garantien ugyldig, men skaber også usikre situationer. Du finder garantibestemmelserne i denne manual.

- Serie- og artikelnumre på din Rollz Motion Electric kan findes på produktmærkaten, som er placeret på sædet (under puden).
- Enhver alvorlig hændelse relateret til enheden skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i dit land/stat.
- Det er vigtigt at registrere dit produkt hos Rollz International på www.rollz.com.
- Følg venligst de regler, der gælder i dit land vedrørende brug af elektriske kørestole.



Sikkerhedsinstruktioner

	Læs og følg instruktionerne i denne manual.
	Brandfarlige materialer: undgå kontakt med åben ild eller gnister. Undgå at batteriet kommer i kontakt med brændbare materialer.

- Rollz Motion Electric er beregnet til at blive brugt til at støtte/transportere én person ad gangen.
- Brug altid håndtagene i den rigtige position. Læs kapitlet **Justering af højden for korrekt kropsholdning** for flere detaljer.
- Kontroller og/eller juster bremsene regelmæssigt for at forhindre tab af bremsekraft. Kontroller bremsene regelmæssigt for at sikre, at du har tilstrækkelig bremsekraft. Se, hvordan du gør det i kapitlet **Justering af bremsene**.
- Kontroller, om alle strømforsyninger er tilsluttet, og de elektriske komponenter, inklusive batteriet, ikke er beskadiget, før du bruger Rollz Motion Electric for første gang. Beskadigede eller forkert tilsluttede dele kan forårsage fare eller usikre situationer. For mere information herom, læs kapitlet **Kabler og forbindelser (Ugentligt)**.
- Joystick-styret elektrisk støtte er ikke nødvendigvis i stand til at klare udendørs forhindringer
- Mens du sidder i Rollz Motion Electric og bruger den joystick-kontrollerede elektriske støtte, skal du altid have styret i rollatorposition, med styret over rammen, så du kan nå håndbremsene i nødstilfælde.
- Elektrisk støtte givet af push support controlleren kan bruges udendørs på overflader, der anses for sikre i denne manual.
- Når du sidder i kørestolen, mens du bruger Rollz Motion Electric med joystick-styret elektrisk støtte, må du kun gå op eller ned ad skråninger på max. 3° / 5,25%.

- Når du går med Rollz Motion Electric, skal du kun gå ned på 15° / 26,8% skråninger, gå op på 7° / 12,3% skråninger og gå på skråninger, der ikke er højere end 3,5° / 6,1%.
- Kontroller batteripakkens kapacitet regelmæssigt ved at se skærmen ved joysticket eller skubbestøtten for at se, om den skal genoplades.
- Hold værktøj og andre metalgenstande væk fra batteripakken. Kontakt med de positive og negative poler kan forårsage kortslutning eller stød.
- Sørg for, at du er fortrolig med funktionerne i Rollz Motion Electric, før du bruger den.
- Sørg for, at Rollz Motion Electric er slukket, når den ikke er i brug.
- Opbevar Rollz Motion Electric i et rent og tørt miljø og undgå at udsætte den for høje og hurtigt skiftende temperaturer. Når det ikke er i brug i længere tid, skal du sørge for, at batteriet er opladet, før du bruger det igen.
- Dette produkt bør holdes væk fra syre, alkali og andre kemiske ætsende genstande.



Advarsler

- Rollz Motion Electric er certificeret som en klasse A kørestol, hvilket betyder, at udendørs brug, mens du sidder i Rollz Motion Electric med joystick-styret elektrisk støtte, er begrænset til: maksimal sikker hældning på 3° / 5,25 %, maksimal forhindringshøjde på 15 mm / 0,6 tomme og maksimal jordujævnhed på 10 mm / 0,4 tomme. Overskridelse af disse grænser kan føre til farlige situationer. Sikker udendørs brug kan kun garanteres i områder, hvor disse betingelser overholdes.
- Det er vigtigt, at brugeren har den fysiske og mentale evne til selvstændigt at udføre alle handlingerne i denne manual. Hvis ikke, bør de altid have nogen til at hjælpe dem.
- Brug ikke Rollz Motion Electric, hvis en del er blevet beskadiget, ødelagt, mangler eller revnet, eller hvis displayet viser en fejlkode, for løsninger på disse fejlkoder, se kapitlet **Fejlkoder og løsninger**.
- Sørg for, at alle komponenter er låst på deres plads før brug.
- Hold Rollz Motion Electric væk fra åben ild og andre varmekilder, såsom cigaretter og elektriske eller gasvarmere.
- Brugeren kan ikke blive siddende i Rollz Motion Electric-kørestolen under transport

i en taxa, bus, bil eller andre motorkøretøjer. Det er ikke beregnet til denne type brug.

- Kørestolens bredde er større end det, der anbefales til klasse A kørestole. Adgang til nødflugtsveje kan være begrænset.
- Når du bruger den joystick-kontrollerede elektriske støtte eller push-støtten på Rollz Motion Electric, er den kontinuerlige kørerækkevidde 15 kilometer / 9,3 miles. Driving range vil falde, når Rollz Motion Electric bruges på skråninger, ujævnt terræn eller når den bruges til at klatre op ad kantsten. Brugervægt, terræn, batteristatus og køreadfærd kan også påvirke rækkevidden.
- Rollz Motion Electric var ikke beregnet til brug på stranden.
- Vi anbefaler at bruge sikkerhedsseletilbehøret, mens du sidder i Rollz Motion Electric.

Uegnede omstændigheder

- For at gå ombord på et fly skal batteriet på Rollz Motion Electric fjernes. Batteriet kan ikke transporteres i kabinen.
- Rollz Motion Electric er ikke egnet til at gå på trapper og gå på ujævnt terræn som grus, græs, sand, mudder eller skovjord.
- Brug ikke rulletrappen, mens du sidder på din Rollz Motion Electric..
- Brug eller parker ikke din Rollz Motion Electric i regn, sne eller andre våde forhold.
- Brug ikke din Rollz Motion Electric under brusebad.
- Brug ikke din Rollz Motion Electric på veje, hvor der bruges salt.
- Brug ikke din Rollz Motion Electric for tæt på vand (f.eks. grøft, dam, flod, sø eller hav).
- Brug ikke Rollz Motion Electric på en overflade med sne, is, vand eller olie.
- Hvis du dog befinder dig med Rollz Motion Electric på en våd glat overflade, skal du fortsætte med forsigtighed, og hvis du bemærker, at et af drivhjulene mister trækkræften, bør du stoppe Rollz Motion Electric med det samme for at forhindre tab af kontrol.
- Udsæt ikke Rollz Motion Electric for temperaturer, der er koldere end -5 °C / 23 °F og højere end 45 °C / 113 °F.

- Produktets overfladetemperaturer kan stige / falde, når det udsættes for eksterne varme- eller kuldekilder.
- Ikke alle dele af Rollz Motion Electric er 100 % vandtætte. Et meget fugtigt miljø kan forårsage rust og korrosion på eller inde i din Rollz Motion Electric. Når du er i et meget fugtigt miljø, bør du straks dække Rollz Motion Electric for at forhindre skade.

Elektromagnetisk interferens

Interferens med elektroniske kilder kan forårsage situationer, hvor Rollz Motion Electric ikke reagerer som normalt. Elektriske kilder såsom sendemaster, radiostationer, tv-stationer og mobiltelefoner kan skabe et magnetfelt, der kan forårsage permanent skade på det elektriske system og/eller bremseevne.

Brugeren skal være opmærksom på følgende:

- Brug ikke trådløse kommunikationsenheder, mens du bruger det elektriske støttesystem.
- Hold dig væk fra radiokilder.
- Sluk straks for Rollz Motion Electric, hvis du bemærker ukontrollerede bevægelser.

Rollz Motion Electric kan forstyrre andre enheder i området, der udsender elektromagnetiske felter (alarmsystemer, automatiske døre osv.).

Hvem kan have gavn af dette produkt

Rollz Motion Electric passer til personer, der vejer op til 100 kg / 220 lbs. / 15 st 10,5 lb, som er 160-190 cm / 5 ft 3" til 6 ft 3" høje (se **produktspecifikationer**).

Rollz Motion Electric fungerer som gangstøtte for personer med nedsat mobilitet, hovedsageligt indendørs (joystick-styret og push-attendant-styret), men også udendørs (push-attendant-styret og joystick-styret, med begrænsninger som nævnt i denne manual). Rollz Motion Electric er velegnet til at gå, køre og skubbe på hårde, flade overflader. I rollatorpositionen kan brugeren hvile på sædet. Kørestolspakken giver mulighed for nemt at forvandle rollatoren til en elektrisk kørestol. Brugeren kan sidde i den elektriske kørestol og bruge det elektriske støttesystem, mens der skubbes og skubbestøtten er tændt, eller ved at transportere sig selv ved hjælp af joystick-controlleren.

Hvem bør ikke bruge Rollz Motion Electric (kontraindikation)

Rollz Motion Electric er ikke egnet til personer:

- Med perceptionsforstyrrelser, som gør det svært at se forhindringer forude.
- Med svære balanceforstyrrelser, der forhindrer dem i at gå med en rollator.
- Som bliver desorienteret eller svimmel, mens de går eller sidder.
- Som kun kan blive stående i mindre end fem minutter bag en rollator.
- Med siddeproblemer, som gør det svært at sidde behageligt på sædet eller i den elektriske kørestol.
- Personer, der har en nedsat håndfunktion.
- Med en vægt højere end 100 kg.

Genbrug


- Rollz Motion Electric er velegnet til genbrug.
- For sikker genbrug skal al teknisk dokumentation videregives til den nye bruger. Den nyeste version af manualen kan findes på www.rollz.com.
- Når du udlåner din Rollz Motion Electric, skal du sørge for, at brugeren læser manualen, før du bruger produktet.
- Før Rollz Motion Electric videregives til en ny bruger, skal den rengøres, desinficeres og kontrolleres af forhandleren for skader for at sikre, at Rollz Motion Electric kan bruges sikkert.

UDPAKNING

Tjek om din levering er komplet

Rollz Motion Electric kommer pakket. Kontroller, om alle nedenstående dele er leveret ifølge **(Figur 2)**:

1. Skub støttecontrolleren
2. Kørestolspakke
3. Armlæn (x2)
4. Sædehynde
5. Motorstyring
6. Justerbare fodstøtter (x2) med unbrakonøgle
7. Baghjulsmotorenhed (x2)
8. Li-ion batteripakke
9. Joystick-controller
10. Justeringshåndtag
11. Undersædekurv
12. 3-i-1 holder
13. Pumpe til de pneumatisk dæk

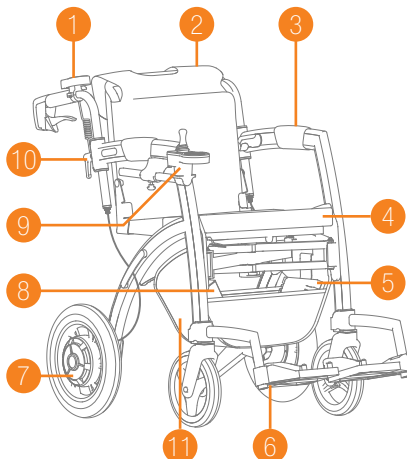


Figur 2: Oversigt over komponenterne i Rollz Motion Electric.

Montering af skubbestøtten og joystick-controlleren

Før du kan bruge Rollz Motion Electric, skal de to kontrollere tilsluttes. Uden korrekt tilsluttede kontrollere kan Rollz Motion Electric opføre sig uventet og på en usikker måde.

Montering af skubbestøtten


- a. Fastgør push-støtte-controlleren **(Figur 3)**. Et klik kan høres, når den korrekte position er nået.

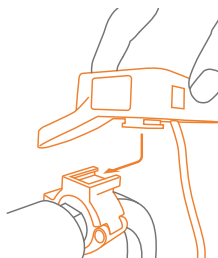


Figur 3: Monter push-støtte-controlleren.

Montering af joystick-controlleren

- a. Sørg for, at kablet til joystick-controlleren er frakoblet, før du sætter den på. Afbryd forbindelsen ved at løsne metal ringene. Skub den afbrudte joystick-controller gennem hullet i holderen. Sørg for, at kablet løber mellem rammen og controlleren som vist i **(Figur 4)**.
- b. Tilslut kablet igen, og stram controlleren ved at dreje knappen **(Figur 5)**.

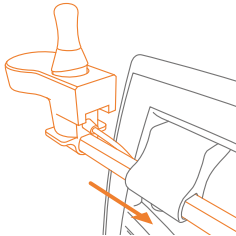

Figur 4: Skub joystick-controlleren ind i holderen.

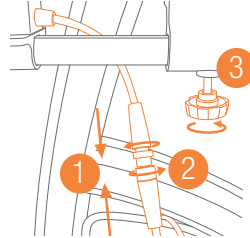

Figur 5: Tilslut (1&2) og spænd (3) controlleren.

Montering af 3-i-1 holderen


3-i-1 holderen kan sættes på plads uden brug af værktøj:

- a. Skub armlænene så langt tilbage som muligt, de to holdere skal placeres foran armlænene med indkøbskroge udad, som vist på **Figur 6**.
- b. Fastgør holderne ved at trykke dem ned på rammen **(Figur 6)**.
- c. 3-i-1 holderen kan holde kørestolspakken (over sædet), en stok og en indkøbspose på samme tid.
- d. Følg instruktionerne i manualen, der følger med 3-i-1 holderen for at se, hvordan du placerer kørestolspakken, stokken og poserne i holderne.
- e. Rollz Motion Electric kan også bruges uden 3-i-1 holderen.




BEMÆRK

Anbring ikke mere end 2,5 kg i hver pose og overbelast den ikke.

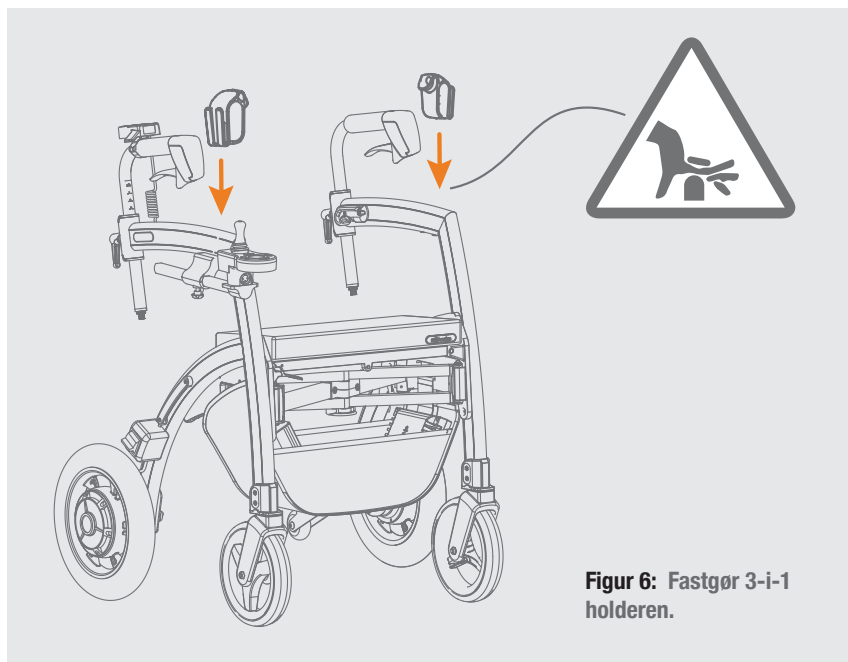

Opladning af Rollz Motion Electric

Batteriet oplades via opladningsporten under joystick-controlleren (**Figur 7**). Sæt stikket på den medfølgende oplader i opladningsporten. Sæt opladeren i en stikkontakt. Rollz Motion Electric oplader, når indikatorlyset på opladningsadapteren bliver rødt. Batteriet er helt opladet, når indikatorlampen bliver grøn. Opladning vil tage 4-5 timer.

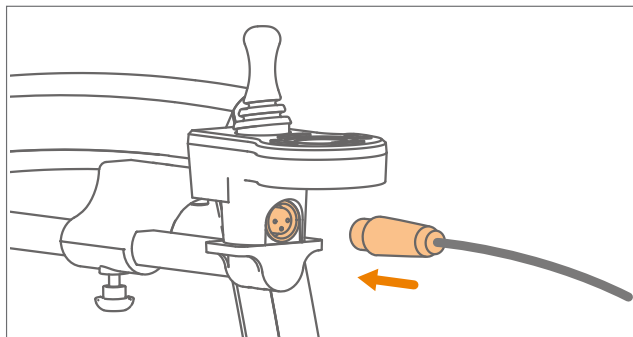

Figur 7: Sæt stikket i opladningsporten.



Advarsler

- Brug ikke metalgenstande eller værktøj til at tilslutte batteriet til opladeren.
- Når batteriet oplades, må Rollz Motion Electric ikke flyttes.
- Brug ikke ikke-godkendte dele på Rollz Motion Electric (såsom motor og oplader).
- Undlad at klemme eller dreje opladerkablet.
- Rygning og ild i nærheden af et opladningsbatteri er forbudt.
- Hold opladeren væk fra børn og kæledyr.
- Hvis der opstår en fejl i det elektroniske kredsløb, skal du informere din leverandør så hurtigt som muligt.
- Placer batteriet og opladeren i et åbent rum under opladning. Læg ingen genstande på opladeren, batteriet eller ledningen. Må ikke placeres i nærheden af varmekilder under opladning.
- Brug ikke batteriet og opladeren ved temperaturer under -5 °C / 23 °F og over 45 °C / 113 °F.
- Hold værktøj og andre metalgenstande væk fra batteriet. Kontakt med metalgenstande kan forårsage stød og kortslutning.
- Hold batteriet væk fra brændbare materialer. Undgå udsættelse for åben ild og gnister.
- Der er ætsende stoffer i batteriet. Åbn aldrig batteriet.

Genbrug af emballagemateriale

Alt emballagemateriale kan genbruges. Papkasserne kan genbruges med papir. De beskyttende skumblokke er lavet af plast. Disse og plastikposerne kan genbruges med plast.

TIP: At beholde din kasse vil hjælpe med at sende din Rollz Motion Electric med posten.



ADVARSEL

Hold plastemballagematerialerne væk fra børn på grund af risikoen for kvælning.

BRUG SOM ROLLATOR


Rollz Motion Electric leveres komplet til brug. Du skal kun montere skubbestøtten og joystick-controller (se **Attaching the push support and joystick controller**) og justere håndtagene til den korrekte højde. Bemærk venligst, at du ikke bør bruge Rollz Motion Electric som en rollator med den elektriske støtte tændt. Læs alle punkter omhyggeligt, før du bruger Rollz Motion Electric rollator:

- Hvad passer hvor?
- Udfoldning og sammenfoldning
- Transport
- Justering af højden for den korrekte kropsholdning
- At gå med Rollz Motion Electric - som rollator
- Betjening af bremserne
- Hvile på Rollz Motion Electric
- Brug af tasken
- At gå over tærskler og kantsten

Hvad passer hvor?

(Figur 8):


1. Håndtag
2. Ramme
3. Baghjul med tromlebremser
4. Rødt udløserhåndtag til at folde rollatoren op
5. Forhjul
6. Forside

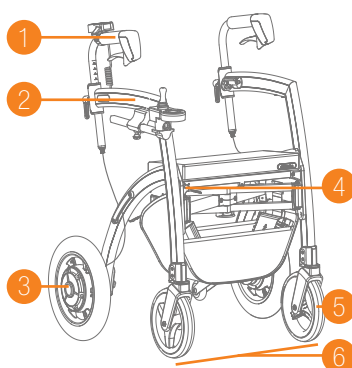

Figur 8: Hvad passer hvor.

(Figur 9):

7. Håndbremser
8. Parkeringsbremsehåndtag
9. Højdeindeksring
10. Justeringshåndtag
11. Justeringsskruer til justering af bremserne
12. Hjælp til at kippe
13. Sædehynde

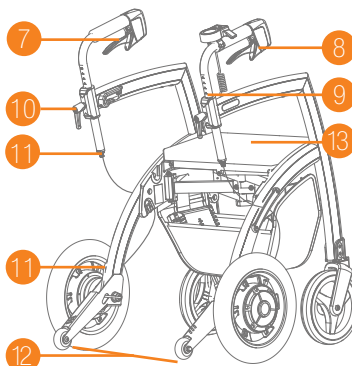


Figur 9: Hvad passer hvor.

Udfoldning og sammenfoldning


Når den er sammenklappet, passer Rollz Motion Electric i de fleste biler.

Udfoldelsen foregår som følger:


- Træk rammesiderne på Rollz Motion Electric fra hinanden, indtil de er næsten helt udfoldet (**Figur 10**).
- Skub sædet ned, indtil det klikker på plads. Vigtigt: sædet er ikke sikret, før du tydeligt har hørt det 'klikke' (**Figur 11**).
- Træk sædehynden væk og placer den lige på sædet (**Figur 12**).

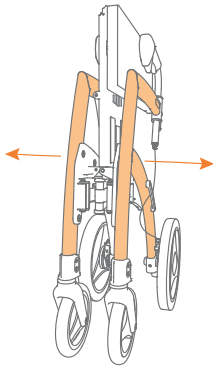

Figur 10: Fold ud ved at trække rammen udad.

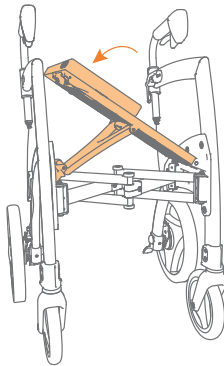

Figur 11: Skub sædet ned, indtil du hører et "klik".

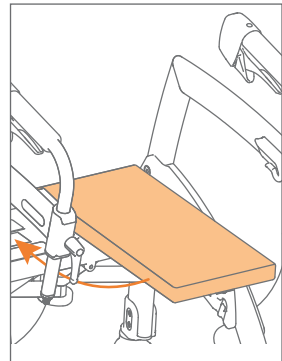

Figur 12: Træk puden væk og fastgør den på sædet.



ADVARSEL

Dobbelttjek, om sædet er låst i. Løft forsigtigt sædet i midten for at sikre, at det er korrekt låst på plads. Først da kan Rollz Motion Electric bruges sikkert.

Sammenfoldningen foregår som følger:

- Før du slår stellet sammen, skal undersædets kurv tømmes, kabler, batteripakke og motorstyring skal forblive i undersædets kurv.
- Fjern kørestolspakken, hvis den er placeret på rollatoren. Læs **Fjernelse af kørestolspakken** for instruktioner.
- Træk sædehynden væk, drej den 90 grader og placer den på kryds og tværs på siden af det røde håndtag (**Figur 13**).


- d. Skub det røde udløserhåndtag under sædet (**Figur 14**) og løft sædet delvist (**Figur 15**).
- e. Skub siderne af rammen mod hinanden, indtil rollatoren er foldet helt sammen (**Figur 16**).

BEMÆRK


Når du slår stellet sammen, skal undersædets kurv kun indeholde kablerne, batteripakken og motorstyringen, og kørestolspakken skal tages af.

Transport


Det er obligatorisk at slukke for din Rollz Motion Electric under transport, og det anbefales kraftigt at du låser parkeringsbremsen.

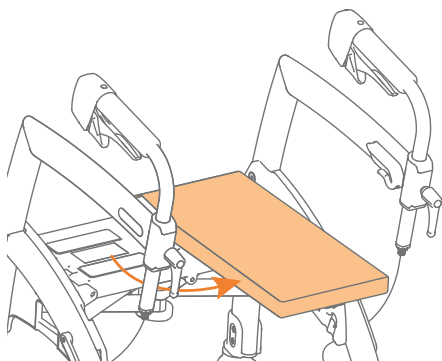


Figur 13: Placer sædehynden på tværs.

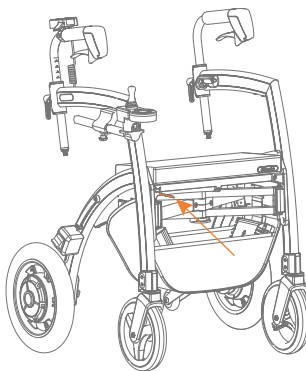

Figur 14: Tryk på den røde håndtag mens du løfter sædet.

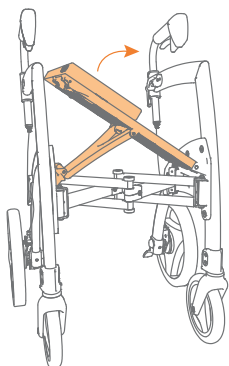


Figur 15: Løft sædet halvvejs.

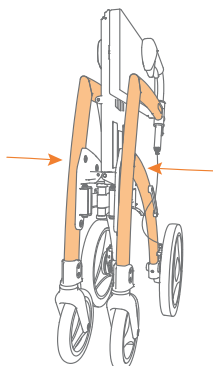

Figur 16: Skub rammen ind.

Under transport skal du sørge for, at din Rollz Motion Electric er placeret i det anviste opbevaringsrum, såsom bagagerummet. Sørg for, at Rollz Motion Electric hviler sikkert under transport og ikke kan bevæge sig frit. Dette forhindrer enhver skade på dig eller din Rollz Motion Electric. Sørg også for at frakoble og transportere joysticket og skub controlleren separat

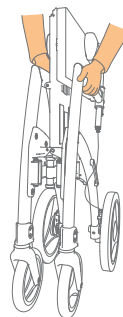


Figur 17: Sådan løftes Rollz Motion Electric.

Løft kun Rollz Motion Electric i rammedele som vist i **Figur 17**.


Justering af højden for korrekt kropsholdning

Indstilling af den korrekte højde (**Figur 18**) er afgørende for optimal brug af Rollz Motion Electric. Højden kan justeres mellem minimum og maksimum position. På denne måde kan Rollz Motion Electric nemt tilpasses individuelle behov.


- For at bestemme den korrekte højde skal du stå mellem Rollz Motion Electric-håndtagene med dine arme hængende tæt på kroppen. Håndtagene skal være i højden af dine håndled (**Figur 18**).
- Løsn justeringshåndtagene mod uret (**Figur 19**) og (**Figur 20**).
- Skub håndtagene til den korrekte højde (**Figur 21**).

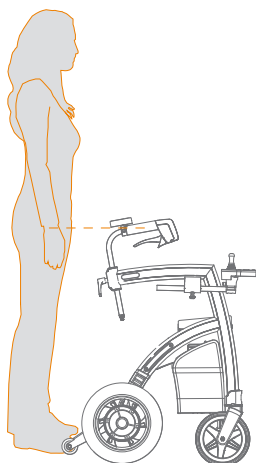


Figur 18: Bestem den korrekte højde.

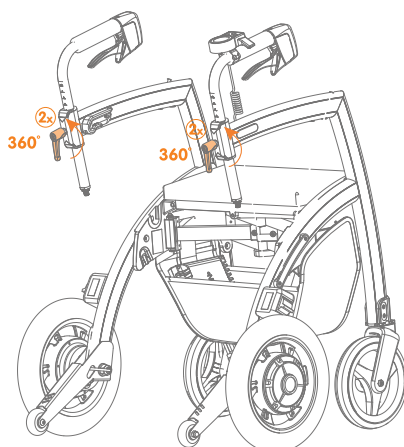


Figur 19: Løsn justeringshåndtagene.

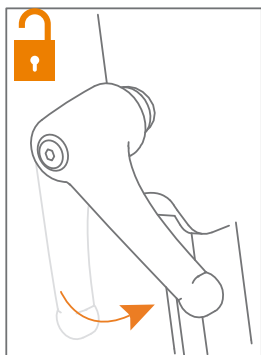

Figur 20: Drej mod uret.

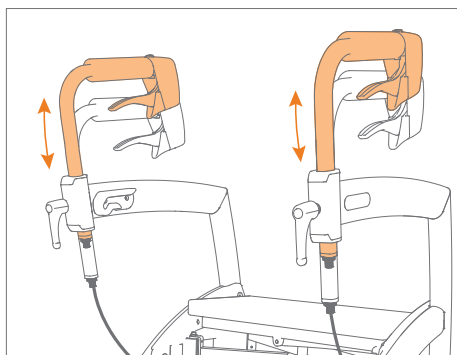


Figur 21: Indstil den korrekte højde.

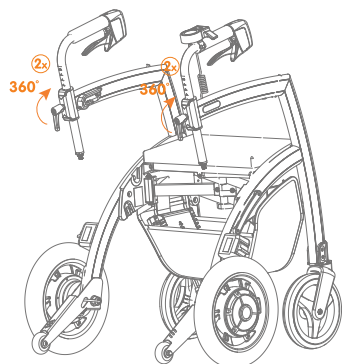


Figur 22: Spænd justeringshåndtagene.



Figur 23: Stram.

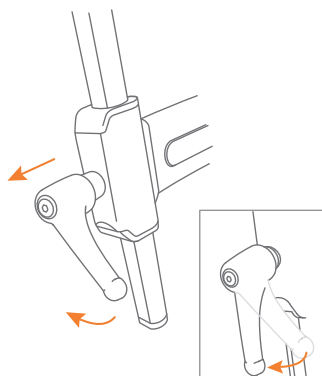

Figur 24: Indstil justeringshåndtaget i den rigtige position.

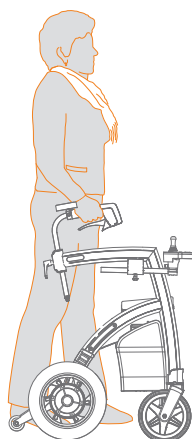

Figur 25: Gå oprejst tæt på rollatoren.

- d. Tjek om begge håndtag er i samme højde ved hjælp af højdeindekseringen.
- e. Sørg for, at håndtagene er placeret i en lige linje over rammen på Rollz Motion Electric, pegende fremad.
- f. Drej justeringshåndtagene med uret for at stramme dem **(Figur 22)** og **(Figur 23)**.
- g. Placer justeringshåndtagene lodret, så de peger lige ned. Det gør du ved forsigtigt at trække justeringshåndtaget udad og dreje det til den korrekte position **(Figur 24)**.



ADVARSEL

Indstil altid begge håndtag i samme højde for at bevare stabiliteten. Når højden er forkert indstillet, kan dette forårsage ubalance, der kan øge risikoen for skader. Når rollatoren ikke er justeret til den korrekte højde, kan det føre til nakke- eller rygsmerten.

Gå med Rollz Motion Electric - som rollator

Takket være det ergonomiske design kan du gå oprejst, stabilt og komfortabelt med Rollz Motion Electric.

- a. Sørg først for, at håndtagene er justeret til den korrekte højde. Se ovenfor i **Justering af højden for korrekt holdning**.
- b. Stå mellem håndtagene, mens du går. På denne måde går du så tæt som muligt på rollatoren, som giver mest støtte **(Figur 25)**. YDu kan læne dig op af Rollz Motion Electric, hvis det er nødvendigt.
- c. Prøv at holde dine arme og hænder så afslappede som muligt, dette forhindrer for store spændinger på kropsdele.
- d. Hold øje med dine omgivelser. Fokuser ikke dine øjne nedad, men fremad, hvilket også forbedrer balancen



ADVARSEL

Mens du går med rollatoren, skal du fortsætte med at kigge foran dig for at bestemme en sikker rute.



ADVARSEL

Undgå at køre et eller alle hjulene ned i et hul eller ujævnt terræn. Rollatoren kan vippe diagonalt, og du kan falde. Rollatoren kan også blive beskadiget.

Betjening af bremserne


Rollz Motion Electric har avancerede tromlebremser, der virker under alle vejrforhold. Bremserne er nemme at betjene og kan give varieret bremsekraft. Jo hårdere du klemmer bremsehåndtagene, jo mere bremser du. Bremserne kan låses, når du parkerer Rollz Motion Electric, så den ikke ruller væk. Test bremsekraften regelmæssigt, især før den første brug, for at opleve, hvordan de virker.

- a. Mens du går, skal du holde fingrene løst omkring skumhåndgrebene **(Figur 26)**. Du kan også holde dem rundt om bremsehåndtagene, med tommelfingeren på indersiden af håndtaget.
- b. Klem bremsehåndtagene for at bremse **(Figur 27)**.
- c. Vil du bruge parkeringsbremsen til at sikre, at rollatoren ikke ruller væk? Klem først bremsehåndtagene, og klem samtidig parkeringsbremsehåndtagene. Slip derefter bremserne. Din rollator er nu i parkeringspositionen **(Figur 28)**.
- d. For at fjerne rollatoren fra parkeringspositionen skal du klemme bremsehåndtagene igen og slippe dem **(Figur 29)**. Rollatoren er ikke længere i parkeringsposition.




ADVARSEL


Når du går, og du klemmer bremsehåndtagene for hårdt, kan Rollz Motion Electric stoppe for hurtigt.

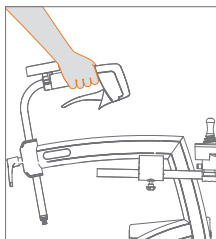


Figur 26: Kørsel.

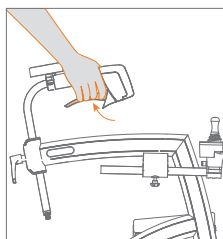

Figur 27: Bremsning.

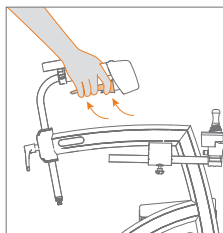

Figur 28: Aktiver parkeringsbremsen.

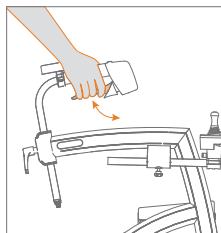

Figur 29: Frigør parkeringsbremsen.

Hvile på Rollz Motion Electric

Rollz Motion Electric rollator giver støtte, når du går. Hvis du vil holde en pause, kan du også sidde på den.

- a. Træk altid parkeringsbremsen, før du forsøger at sidde (se **Betjening af bremserne**), ellers kan Rollz Motion Electric rulle væk, mens du forsøger at sidde på den, eller mens du sidder på den.
- b. Sæt dig ned på rollatorsædet bagfra (**Figur 30**). Sørg altid for, at Rollz Motion Electric rollator er i parkeringsposition.




ADVARSEL

Sid kun og bevæg dig rundt på Rollz Motion Electric, når kørestolspakken er fastgjort. Hvis kørestolspakken ikke er fastgjort, er rollatoren ikke egnet til at flytte dig rundt, mens du sidder. Den er ikke designet til dette formål. Du kan falde, mens du gør dette, med alle de dermed forbundne risici.

Brug af kurven

- a. Du kan nå ind i kurven under sædet fra bagsiden af Rollz Motion Electric.
- b. Kurven kan bære en maksimal vægt på 6 kg.
- c. Når kurven er tom, bortset fra kablerne, batteripakken og motorstyringen, kan den forblive fastgjort, når rammen foldes.

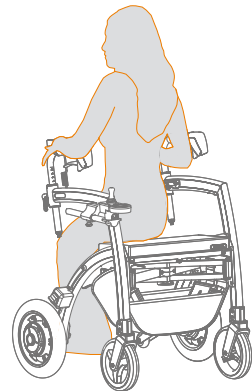

Figur 30: Siddende på rollatorsædet.

BEMÆRK

Overbelast ikke kurven.


At gå over tærskler og kantsten

For nemt at komme på fortovet op til en højde på omkring 12 cm eller over tærskler, har Rollz Motion Electric to vippehjælpemidler


- a. Placer Rollz Motion Electric rollatoren med forhjulene mod tærsklen eller kantstenen.
- b. Skub venstre eller højre vippehjælpemidler (**Figur 31**) ned med din venstre eller højre fod, mens du vipper Rollz Motion Electric mod dig med dine hænder. På denne måde løfter forhjulene sig fra jorden. Skub nu Rollz Motion Electric

fremad, indtil du er tydeligt på kantstenen eller over tærsklen med forhjulene **(Figur 32)**.

- c. Placer forhjulene på fortovet eller jorden.
- d. Skub derefter rollatoren længere frem, indtil baghjulene også er helt på fortovet eller over tærsklen.

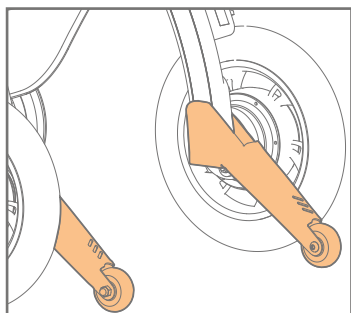

Figur 31: Brug anti-kip-hjælpen.

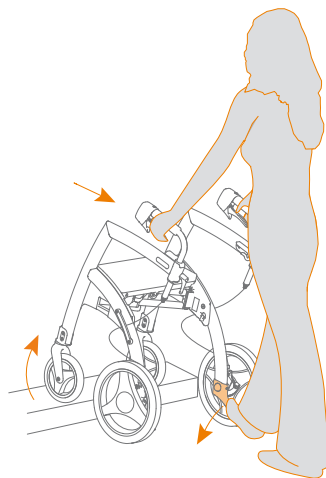

Figur 32: At komme på kantsten eller fortovet eller gå over en tærskel.

FRA ROLLATOR TIL ELEKTRISK KØRESTOL

Rollz Motion Electric leveres med kørestolspakken inkluderet. Denne pakke kan fastgøres til Rollz Motion Electric før afgang **(Figur 33)**. Dette gør det muligt for rollatoren at blive omdannet til en elektrisk kørestol på vejen på mindre end et minut. Du skal kun trække kørestolspakken op, placere fodstøtterne på stellet og dreje håndtagene. Så kan du sidde i den elektriske kørestol. Med det elektriske støttesystem kan du også sidde i stolen og køre selv ved at bruge joysticket, eller den, der skubber el-kørestolen, kan bruge push support-controlleren. Den elektriske kørestol kan nemt forvandles til en rollator igen.



ADVARSEL

Rollz Motion Electric-kørestolen kan bære en maksimal vægt på 100 kg eller 220 lbs. Denne elektriske kørestol er beregnet til kun at blive brugt af én person ad gangen. Når flere personer sidder på den elektriske kørestol eller rollator, kan Rollz Motion Electric blive beskadiget.




ADVARSEL


Under transport i en kørestolseget taxa, bus, tog eller andet køretøj, kan brugeren ikke blive siddende i Rollz Motion Electric. Den elektriske kørestol er ikke beregnet til denne brug. Rollz Motion Electric kan ikke transporteres i kabinen på et fly, medmindre batteriet er fjernet.

Hvad passer hvor på Rollz Motion Electric


1. Kørestolspakke
2. Rødt håndtag
3. Låsebolte
4. Indhak bag sædet
5. Øvre styreskinner på rammen
6. Ryglæn
7. Fodstøtteholdere
8. Fodstøtter
9. Armlæn
10. Håndter kørestolspakke

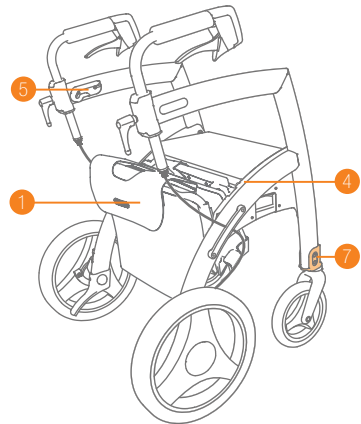

Figur 35: Rollz Motion Elektrisk rollator med påsat kørestolspakke.

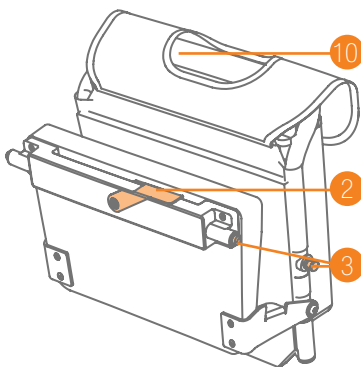

Figur 33: Kørestolspakke.

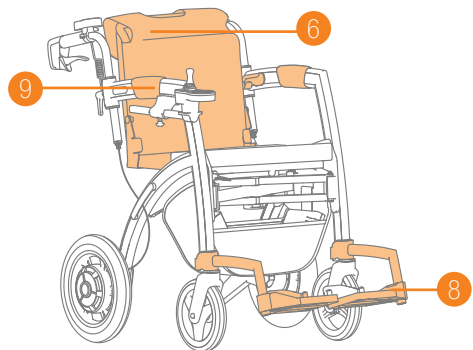


Figur 34: Rollz Motion Electric i elektrisk kørestol, med personskubbeposition.

Montering af Rollz kørestolspakke


- a. Hold Rollz-kørestolspakken med tasken mod dig (**Figur 36**).
- b. Løft det røde håndtag med den anden hånd, så låseboltene trækkes tilbage.
- c. Placer Rollz-kørestolspakken i de to indhak bag (**Figur 37**) og (**Figur 38**).
- d. Skub det røde håndtag tilbage uden kraft for at låse kørestolspakken.
Låseboltene vil strække sig, så pakken er ordentligt fastgjort (**Figur 39**). Du kan nu gå med Rollz Motion Electric som rollator, mens du bærer kørestolspakken.

BEMÆRK


At tvinge det røde håndtag ned kan beskadige Rollz Motion Electric.

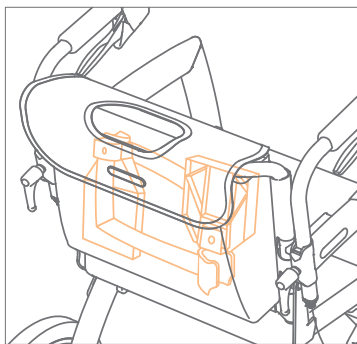


Figur 36: Fodstøtterne i tasken til transportstolspakken.

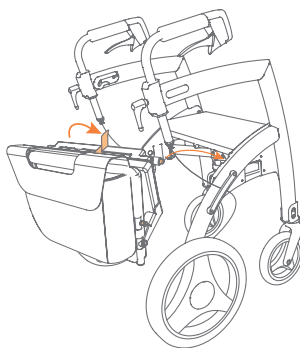

Figur 37: Montering af transportstolspakken.

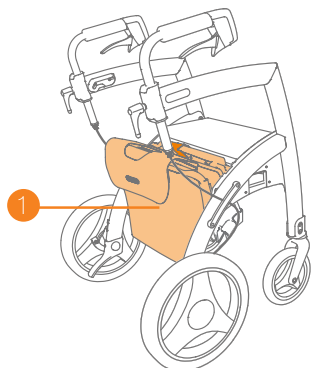

Figur 38: Kørestolspakke vedhæftet.

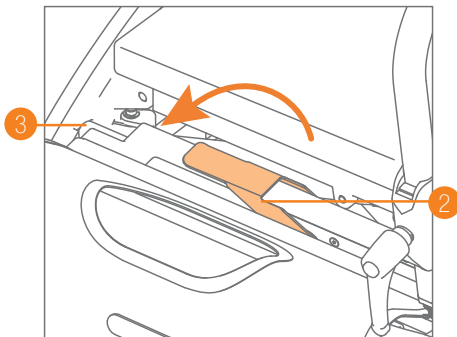

Figur 39: Låsning af kørestolspakken.

- e. Hvis det røde håndtag ikke går ned uden at tvinge det, skal du tage kørestolspakken ud af hakkene bag sædet og prøve igen. Kontakt venligst din leverandør, hvis du stadig har problemer efter flere forsøg.

Brug af Rollz kørestolspakke

- a. Fastgør kørestolspakken til Rollz Motion Electric, før du går ud (**Figur 37**).
- b. For at ombygge rollatoren til en elektrisk kørestol skal kørestolspakken trækkes op. Tag håndtaget på kørestolspakken og træk lidt op og fremad indtil halvvejs op af rammen (**Figur 40**).
- c. Træk ryglænet længere op og derefter tilbage (**Figur 41**), så låseboltene klikker ind i de øverste styreskiner på rammen (**Figur 42**). Hvis de øverste låsetappe ikke glider glat ind i de øverste styreskiner på rammen, skubbes ryglænet frem, indtil det er halvvejs op af rammen, og prøv igen.

BEMÆRK


Hvis kørestolspakken ikke trækker jævnt op, skal du ikke bruge kraft. Dette kan beskadige kørestolspakken. Kontakt din leverandør, hvis problemet fortsætter efter flere forsøg.

- d. Løsn justeringshåndtagene mod uret (**Figur 43**) og drej håndtagene rundt via ydersiden, indtil de peger bagud (**Figur 44**). Juster højden for den person, der skubber den elektriske kørestol, og drej justeringshåndtagene med uret for at stramme dem (**Figur 45**). Se **Justering af højden for korrekt holdning**.
- e. Tag fodstøtterne ud af kørestolstasken og placer dem foran på Rollz Motion Electric i fodstøtteholderne på stellet. Skub dem ned fra toppen af fodstøtteholderne (**Figur 46**). Anvend ikke kraft, hvis fodstøtterne ikke glider jævnt over fodstøtteholderne. Tag dem ud og prøv igen.
- f. Den elektriske kørestol er nu klar til brug (**Figur 47**).




ADVARSEL

Inden du sætter dig ned, skal du altid kontrollere, at låseboltene er korrekt fastgjort i styreskinerne. Sæt dig ikke ned, hvis en af låseboltene ikke er sikret. Prøv i stedet at placere sædet igen.

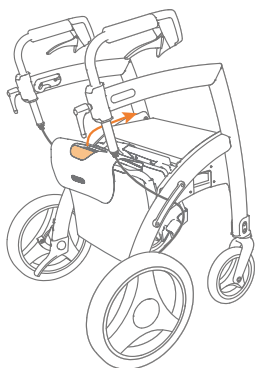

Figur 40: Træk ryglænet opad og fremad.

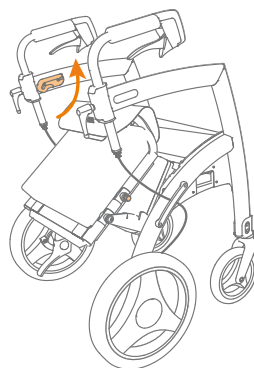


Figur 41: Træk ryglænet længere op.




Figur 42: Klik ryglænet ind i styreskinnerne.




Figur 43: Løsn justeringshåndtagene.

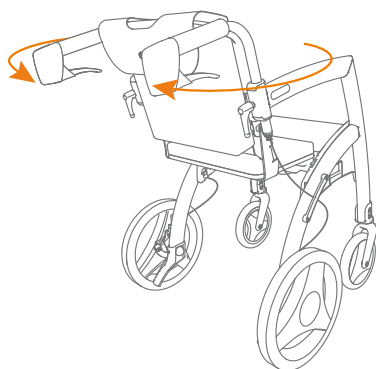


Figur 44: Drej håndtagene.

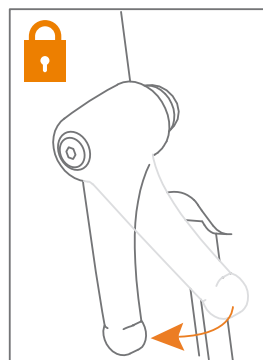

Figur 45: Spænd justeringshåndtagene.

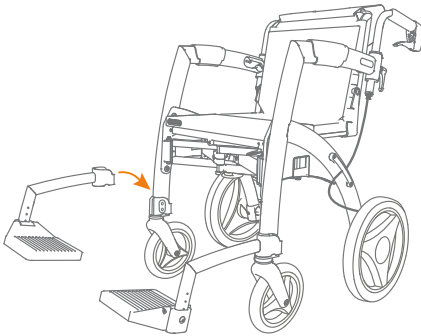

Figur 46: Placer fodstøtterne.

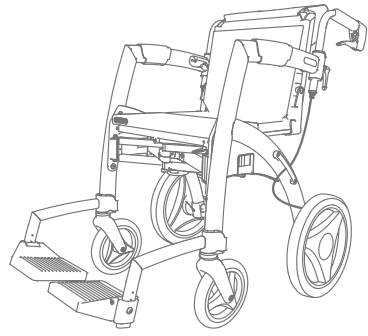


Figur 47: Elektrisk kørestol er klar til brug.


Indstilling af fodstøtter (kun én gang)

Rollz Motion Electric leveres med justerbare fodstøtter. Du kan justere dem til den ønskede højde med den medfølgende unbrakonøgle i størrelse 5 (**Figur 48**).


Den korrekte højde afhænger af længden af underbenet og den måde, brugeren sidder på. Er fodstøtterne sat for højt, bliver der for meget tryk på balderne. Hvis fodstøtterne er sat for lavt, er trykket på overbenene for højt. I en korrekt stilling sidder brugeren med underbenene i en vinkel på ca. 90 grader (**Figur 49**). Bagsiden af fødderne kan hvile mod stoffet.

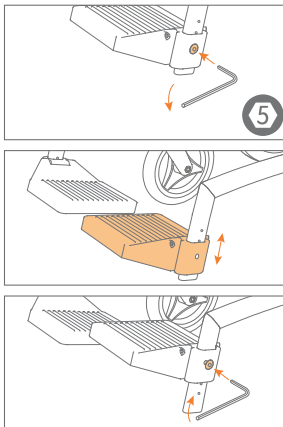


Figur 48: Justering af højden på fodstøtterne med en unbrakonøgle størrelse 5.

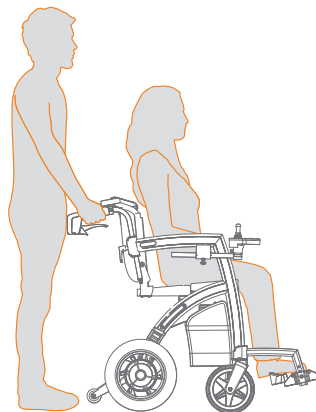


Figur 49: God siddestilling i kørestolen.

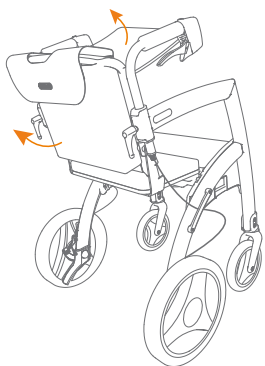


Figur 50: Tydelige justeringsstropper.

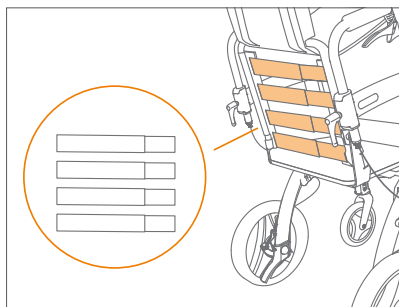


Figur 51: Fire justerbare justeringsstropper.

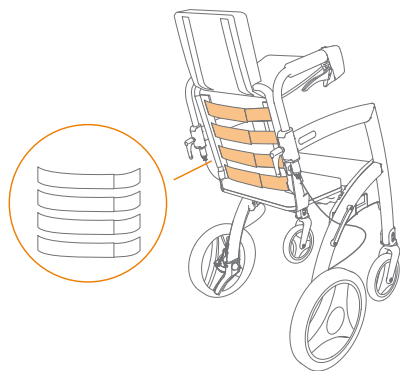


Figur 52: Løsn for mere sædedybde.

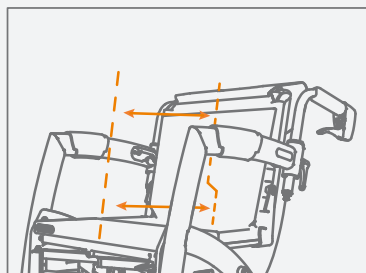

Figur 53: Sænk to rygastropper løsnet.

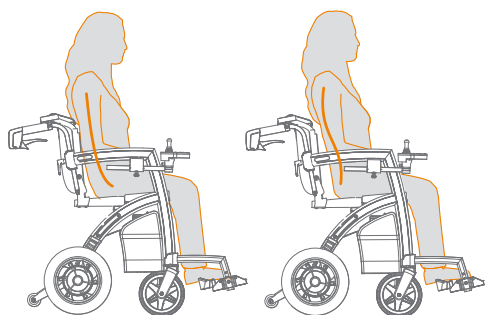

Figur 54: Før og efter justering af rygastropperne, til højre ser du den korrekte position.

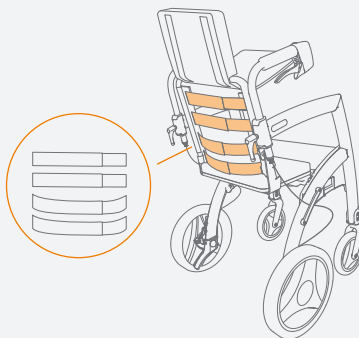

Indstilling af ryglænet (kun én gang)

usteringsstropper er placeret i ryglænet på Rollz kørestolspakken. For optimal siddekomfort er det vigtigt at tilpasse disse justeringsremme til brugeren. Det er kun nødvendigt at gøre dette ved første brug – eller hvis brugeren har gennemgået store ændringer i vægt.

- a. Vend Rollz Motion Electric om til en elektrisk kørestol (**Figur 47**) og fjern fodstøtterne fra kørestolens pakkepose.
- b. Træk tasken til kørestolspakken og ryglænsdækslet op fra bunden (**Figur 50**). Justeringsremmene er nu tydeligt synlige (**Figur 51**).
- c. Juster stropperne ved at trække velcroen af og fastgøre den igen til den ønskede indstilling (**Figur 52**).
- d. I de fleste tilfælde vil de nederste stropper blive justeret løsere end de to øverste stropper (**Figur 53**). Fastgør velcroen, så brugerens bækken er ordentligt oprejst, og ryglænet støtter ryggen.
- e. Læg ryglænsdækslet og kørestolens pakkepose ned.
- f. Kontroller, om brugeren er komfortabelt i en korrekt siddeposition (**Figur 54**).



ADVARSEL

Sørg for, at stropperne i ryglænet er korrekt justeret (se **Indstilling af ryglænet**). Hvis sædedybden er stor nok, placeres vægten af personen så langt tilbage i sædet som muligt. Det er mere sikkert for brugeren, men også lettere for pusheren at skubbe.

Lægning af kørestolspakken


Følg disse trin for at forvandle den elektriske kørestol til en rollator:

- a. Fjern fodstøtterne. Skub fodstøtterne op, indtil de frigøres fra fodstøtteholderne. Læg dem tilbage i tasken til Rollz-kørestolspakken, spejlet i forhold til hinanden (**Figur 55**).
- b. Tag fat i håndtaget på kørestolspakken, og skub ryglænet fremad, indtil det er halvvejs op af rammen. Sænk derefter ryglænet ned, indtil det klappes sammen bag sædet.


- c. Løsn justeringshåndtagene mod uret, og drej håndtagene udad, indtil de peger lige frem. Indstil den korrekte højde for dig, og spænd justeringshåndtagene med uret. Se **Justering af højden for korrekt holdning**.
- d. Kørestolspakken forbliver på plads, når den er foldet sammen, og rollatoren kan bruges til at gå.

Fjernelse af kørestolspakken

- a. Træk det røde håndtag op uden kraft. På denne måde bindes låseboltene fast, og kørestolspakken låses op (**Figur 56**).
- b. Hold i håndtaget på kørestolspakken og træk den op uden kraft.
- c. Skub derefter det røde håndtag ned.
- d. Pakken kan nu opbevares, for eksempel ved transport af Rollz Motion Electric i en bil. Fodstøtterne forbliver inde i pakken.

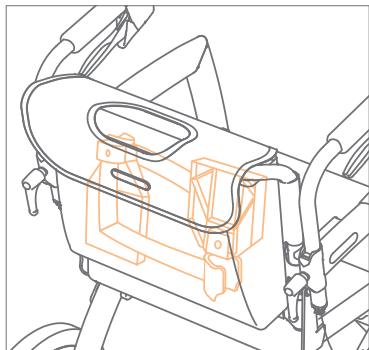

Figur 55: Opbevaring af fodstøtter spejlvendt.

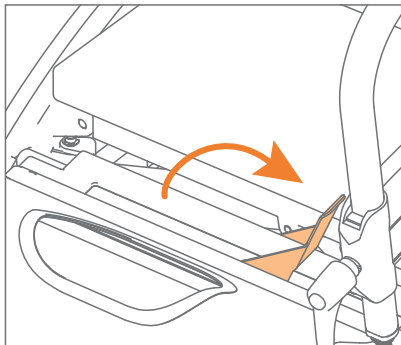

Figur 56: Oplåsning af kørestolspakken.

Sikkerhedsinstruktioner

In the dark or with heavy rainfall, visibility on the road can be obstructed. Look together for the best and safest walking route. Good visibility is important.

ANVENDELSE SOM ELEKTRISK KØRESTOL - med en person, der skubber

Matcher dit tempo

Den, der sidder i den elektriske kørestol og bliver skubbet for første gang, skal have tid til at vænne sig til det. Det samme gælder for den person, der skubber kørestolen. Personen, der skubber, og den, der sidder i den elektriske kørestol, bør regelmæssigt kommunikere om tempo og rute. På denne måde vil begge vænne sig til at bruge Rollz Motion Electric-kørestolen. Gå langsomt i starten, hvilket vil give dig tid til at lære at bruge rollatoren med selvtilid.

Brug af det elektriske støttesystem - med en person, der skubber

Mens du sidder i stolen, kan den, der skubber, aktivere den elektriske skubbestøtte ved at trykke på On/Off-knappen.

(Figur 57):

1. Multifunktionelt display
2. Gear display
3. Batteridisplay
4. Tænd/sluk-knap
5. Power assist
6. Retning
7. Gear
8. Ladeport (bruges ikke)



Figur 57: Skub støttecontroller knapper og komponenter.

Følgende trin kan kun ske, når den person, der skubber kørestolen, har hænderne på håndtaget. Når personen tager hænderne fra håndtaget, stopper skubbestøtten.

Ved at trykke på **I** ⚡, kan den person, der skubber kørestolen, ændre den fremadgående bevægelse til en baglæns bevægelse.

Ved at trykke på **M**, kan den person, der skubber kørestolen, gå gennem de forskellige gear, som er følgende:

- 01: Let powerassistance, maksimal hastighed 3,0 km/t / 1,9 mph
02: Medium power assistance, maksimal hastighed 4,3 km/t / 2,7 mph
03: Høj power assistance, maksimal hastighed 5,5 km/t / 3,4 mph

Automatisk låsning i tilstand 01 ~ 03: den automatiske låsning sker 5 sekunder efter, at håndgrebet er sluppet, derefter låses støttesystemet automatisk, displayet viser "LL", Rollz Motion Electric låser og kan ikke bevæge sig. Frigør låsen ved at holde håndtaget igen og trykke på en vilkårlig knap eller tast på trykstøtte-controlleren, "LL" forsvinder, og låsen udløses.

Power assist-tilstande

Konstant power assist: Hold håndtaget, tryk på On/Off-knappen. Tryk med tommelfingeren på  I knappen, så kørestolen kører automatisk med den indstillede gearhastighed. Hvis du vil ændre retning fra fremad til bagud, skal du trykke på  I knap. Hvis LCD-ikonet  I blinker, er du i omvendt tilstand. Hvis du begynder at gå baglæns, vil der opstå en biplyd.

Auto-power assist: Hold håndtaget, skub Rollz Motion Electric og auto-power assist tænder automatisk. Jo mere kørestolen bliver skubbet, jo mere kraft giver den automatiske power assist. Jo højere gear, jo mere kraft. Den automatiske power assist fungerer, når kørestolen skubbes fremad og trækkes bagud. Mens du går ned ad bakke, kan den automatiske power assist skabe modstand.

Hvis den automatiske power assist-tilstand er utilstrækkelig, mens du går op ad bakke, kan den konstante power assist startes ved at trykke på  I knappen for at skabe en ensartet ganghastighed.

Anti-fald: Hvis kørestolens hastighed bliver for høj, mens du skubber kørestolen, bremser kørestolen automatisk. I dette tilfælde viser displayet "EE". For at løse dette og fortsætte med at skubbe kørestolen: Tag dine hænder væk fra håndtaget, "EE" forsvinder, og anti-fald-modus vil lette.



ADVARSEL

- Kør ikke ind i et hul eller ujævnt terræn. Den elektriske kørestol kan vippe med den person, der sidder i den.
- Kollider ikke hårdt mod afsatser eller forhøjninger. Personen, der sidder i den elektriske kørestol, kan blive sendt ud af den.

- Mens du går med den elektriske kørestol, skal du se omhyggeligt fremad for at bestemme en sikker rute.
- OBS: Skub ikke den elektriske kørestol væk fra fortovet eller ujævnheder, der vender fremad. Dette kan være farligt, fordi personen i den elektriske kørestol kan vælte. Vend den elektriske kørestol rundt og gå baglæns væk fra fortovet.

Går op ad en kantsten

Det er ofte nemmere at bruge rullelisten på fortovets kantsten (hvis nogen). For kantsten op til 15 mm:

- a. Placer kørestolens forhjul mod kantstenen.
- b. Skub langsomt kørestolen fremad.
- c. Når forhjulene er på kantstenen, skal du blive ved med at skubbe kørestolen fremad, så baghjulene også kommer på kantstenen.

For kantsten højere end 15 mm og lavere end den maksimale kantstenshøjde på 50 mm:

- a. Vend kørestolen rundt, drej skubbestøtten fra og anbring tippehjelpenes hjul mod kantstenen
- b. Træk langsomt kørestolen bagud, så hjulene på tipningshjælpemidlerne går op ad kantstenen (**Figur 58**). Bak, indtil alle hjul er kommet op ad kantstenen.
- c. Vend kørestolen rundt og aktiver skubbestøtten.

At komme sikkert af fortovet

Sådan går du ned ad en kantsten fra fortovet (**Figur 59**):

- a. Se omhyggeligt fremad for at vælge den glatteste rute.
- b. Vær forsigtig, når du nærmer dig kantsten, højdeforskel eller ujævnt terræn.
- c. Skubberen drejer kørestolen og kører langsomt baglæns ud af kantstenen.
- d. Den, der sidder, læner sig op ad ryglænet, indtil flytningen er udført.




ADVARSEL

Hvis skubberen pludselig bevæger sig fremad med den elektriske kørestol fra en kantsten eller afsats, der er højere end ca. Dette kan også ske, hvis skubberen rammer en højderyg i tempo. Undgå derfor, at du kører eller støder ind i en forhindring.


Undgå grøfter, huller eller huller. Et af forhjulene kan brat havne i et hul, der får kørestolen til uventet at vælte. Den uforholdsmæssige mængde kraft på et af forhjulene kan også beskadige affjedringen. Så vær forsigtig og vælg en sikker rute.

Skråninger

Den elektriske kørestol er beregnet til brug på en hård, plan overflade. Det er sværere at holde kursen på veje, der er lidt bakket. Hældningen bør ikke overstige 3° (**Figur 60**).

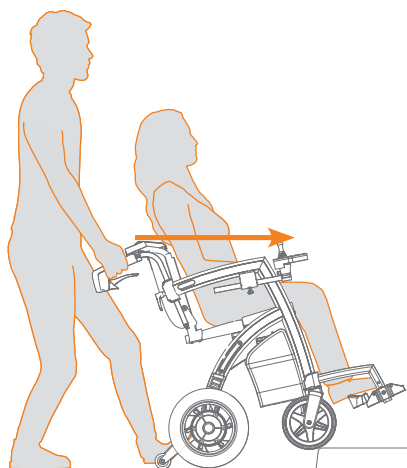

Figur 58: At gå op ad en kantsten ind på et fortov.

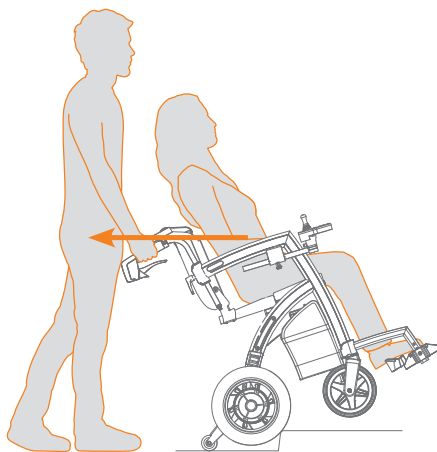


Figur 59: At komme baglæns ned af fortovet.



ADVARSEL


- Bredhældningen må ikke overstige 3°. Hvis krængningsvinklen er større, er der risiko for at vælte med den elektriske kørestol.
- Hvis du går op ad en skråning, kan det være svært at skubbe. Hvis skubberen ønsker at holde pause, skal du aktivere parkeringsbremsen.
- Vær meget forsigtig, når du går ned ad en skråning. Skubberen skal bremse forsigtigt for at forhindre, at den går for hurtigt.
- Sørg for ikke at køre på stejle skråninger.

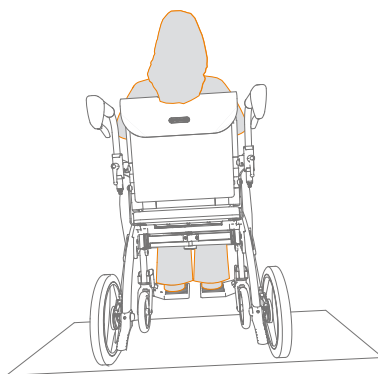

Figur 60: Den maksimale krængningsvinkel er 3°.

BRUG AF JOYSTIKKET - mens du sidder i el-kørestolen

Mens du sidder i stolen, med styret i rollatorposition, så du altid kan bruge håndbremsene i nødstilfælde, så stængerne over stellet, kan du aktivere det elektriske støttesystem **(Figur 61)** ved at trykke på Tænd-knappen på den forreste kontrol.

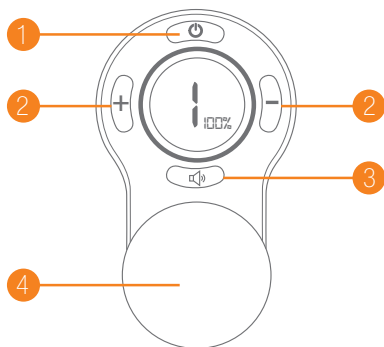

(Figur 61):

1. Tænd/sluk-knap
2. Gearknapper
3. Horn
4. Joystick

Figur 61: Joystick-controller-display og knapper.

Ved at trykke på gearknapperne | — | og/eller | + | du kan gå igennem de forskellige gear. Jo højere gear, jo hurtigere er hastigheden (1,2 – 6 km/t / 0,8 – 3,7 mph). Det maksimale hastighedsområde baglæns er mellem (1,0 – 2,2 km/t / 0,6 – 1,4 mph).

Ved at bruge joysticket kan du ændre retningen, ved at slippe joysticket eller flytte det til midterpositionen vil Rollz Motion Electric bremse. Du kan også trække joysticket mod dig, hvilket vil bremse kørestolen hurtigere, men dette flytter også kørestolen bagud.

Når du bruger joysticket, mens du sidder i kørestolen for første gang, skal du indstille Rollz Motion Electric til den laveste hastighed. Dette hjælper dig med at blive fortrolig med styresystemet. Når du føler dig godt tilpas nok, kan du vælge at øge den maksimale hastighed.

Horn

Ved at trykke på |  | knappen lyder et horn. Brug dette til at advare andre om din tilgang eller nærvær.



ADVARSEL

Pas på ikke at tage bratte sving ved høj hastighed. Ved, at vendecirklen er 158 cm.

Bakning

Ved at trække joysticket mod dig, kører du baglæns, køр altid forsigtigt. Sørg for, at din vej er så fri for forhindringer som muligt. Bak ikke fra en skråning.



ADVARSEL

- Køр ikke ind i et hul eller ujævnt terræn.
- Kollider ikke hårdt mod afsatser eller forhøjninger.
- Se omhyggeligt for at bestemme en sikker rute.
- Bemærk: Køр ikke af fortovet eller ujævnheder på mere end 15 mm.

Går op ad en kantsten

Sådan går du op ad en kantsten på et fortov (**Figur 58**):

- a. Placer kørestolens forhjul mod kantstenen.
- b. Bevæg joysticket fremad, du kan køre på kantsten på 15 mm / 0,6 tommer høj.
- c. Når forhjulene er på kantstenen, skal du blive ved med at skubbe joysticket fremad, så baghjulene også kommer på kantstenen.

Det er ofte nemmere at bruge rullelisten på fortovets kantsten (hvis nogen).

At komme sikkert af fortovet

Sådan går du ned ad en kantsten fra fortovet (**Figur 59**):

- a. Se omhyggeligt fremad for at vælge den glatteste rute.
- b. Vær forsigtig, når du nærmer dig kantsten, højdeforskel eller ujævnt terræn.
- c. Når du går ned ad en kantsten, skal du langsomt køre kørestolen væk fra kantstenen. Kantsten skal være mindre end 15 mm / 0,6 tomme.
- d. Det er ofte nemmere at bruge rullelisten på fortovets kantsten (hvis nogen).

Skråninger

Den elektriske kørestol er beregnet til brug på en hård, plan overflade. Det er sværere at holde kurs på veje lidt bank. Hældningen bør bestemt ikke være for stærk til at forhindre vipning, ikke mere end 3° (**Figur 60**).



ADVARSEL

- Bakkevinklen må ikke overstige 3°. Hvis krængningsvinklen er større, er der risiko for at vælte med den elektriske kørestol.
- Vær meget forsigtig, når du kører ned ad en skråning.
- Brug af Rollz Motion Electric på rulletrapper er forbudt.

Forflytninger (op- og udstigning af kørestolen)

Øv dig i at komme ind og ud af kørestolen med din praktiserende læge (fysio- eller ergoterapeut), hvis det er muligt. Når du stiger ind og ud af den elektriske kørestol, skal du bruge armlænene som støttepunkt og ikke joysticket.

Følgende punkter skal følges for at undgå mulig skade:

- Kør Rollz Motion Electric så tæt som muligt på det sted, hvor overførslen vil finde sted.
- Sørg for, at Rollz Motion Electric er slukket, når du stiger ind eller ud.
- Brug ikke fodstøtten til at rejse dig, når du stiger ind eller ud.
- Træk parkeringsbremsen, før du stiger ind eller ud.
- Sørg for, at dine fødder ikke kommer i klemme bag fodstøtten eller rammedelene.

Siddestilling

For at undgå at vælte under kørslen skal du observere en række punkter, der kan påvirke stabiliteten og balancen af Rollz Motion Electric. Følgende punkter påvirker projektionen af tyngdepunktet:

- Højde og vinkel på sædet.
- Brugerens siddestilling.
- Skrånende overflade.
- Brugerens højde og vægt.
- Det er ikke tilladt selv at foretage justeringer på Rollz Motion Electric.
- At forlænge armene og/eller flytte dem for at få fat i genstande fra din Rollz Motion Electric vil påvirke vendepunktet for Rollz Motion Electric.
- Flyt dig selv ved kun at læne dig op ad armlænene på Rollz Motion Electric.

- Flyt kun dig selv, mens du holder stille.
- Læn dig ikke på fodstøtten, når du flytter dig selv.
- Saml ikke genstande op fra gulvet, som kræver, at du rækker over dine knæ.
- Læn dig aldrig over ryglænet. Dette kan få Rollz Motion Electric til at vælte.
- Løft ikke Rollz Motion Electric, mens passageren sidder.

SPECIFIKATIONER FOR ROLLZ MOTION ELECTRIC

Produktspecifikationer (Figur 62) - (Figur 63) Oplysninger om materialet

Ramme: svejset aluminium med belægning.

Håndtag: polyurethan (PU) skum.

Sædepudebetræk og kørestolspakkebetræk: 100% polyester.

Inderpudesæde og kørestolspakkesæde: fyld af polyurethan (PU) skum.

Joystick og controller trykknapper: syntetisk gummi.

Forhjul på Rollz Motion Electric: PU gummidæk.

Baghjul på Rollz Motion Electric: aluminiumsfælg med pneumatiske dæk.

Dækket er lavet af syntetisk gummi, inderslangen af syntetisk gummi med en såkaldt bilventil.

Armlæn: et elastisk fiberstof af neopren og syntetisk gummi (Styrol Butadien Rubber) fyldt med EVA-skumgummi.


Fodstøtter: aluminiumsramme med plastfodstøtter.

Batterikasse: aluminiumslegering.


Vippesikring: stål.

PRODUKTMÅL	
Model	Rollz Motion Electric
Klasse	A
Vægt rollator	19,6 kg (ekskl. batteri) eller 22,6 kg (inklusive batteri)
Vægt kørestolspakke	3,4 kg
Vægt elektrisk kørestol	23 kg (ekskl. batteri) eller 26 kg lbs (inklusive batteri)
Rollator udfoldet med joystick og trykstøtte påsat H x D x B	88-99 x 71 x 74 cm
Elektrisk kørestol udfoldet, med styr over rammen H x D x B	91-99 x 100 x 74 cm
Mål rollator foldet H x D x B	90 x 71 x 44 cm
El-kørestol udfoldet H x D x B	91-96 x 110 x 74 cm
Baghjuls diameter	12,5 tommer (luftdæk)
Baghjuls bredde	2 ¼ tommer
Forhjuls diameter	8 tommer (luftdæk)
Forhjuls bredde	1 ¼ tommer
Vende bredde	116 cm / 45.7 tommer
Rækkevidde	15 km
Højeste hastighed	6 km/h
Stoppe distance	<100cm / <39,4 tommer
Lydniveau	<65 dB

Afstands rækkevidden reduceres, hvis kørestolen bruges hyppigt på skråninger, ujævn terræn eller til at forcere kantsten. Stoplængden på skråninger kan være væsentligt større end på jævnt underlag. Den maksimale bredde på 740 mm / 29,1 tommer er større end den maksimale bredde, der anbefales i a.1.1 i EN 12184:2014 på 700 mm / 27,6 tommer. Adgangen til flugtveje kan være begrænset.

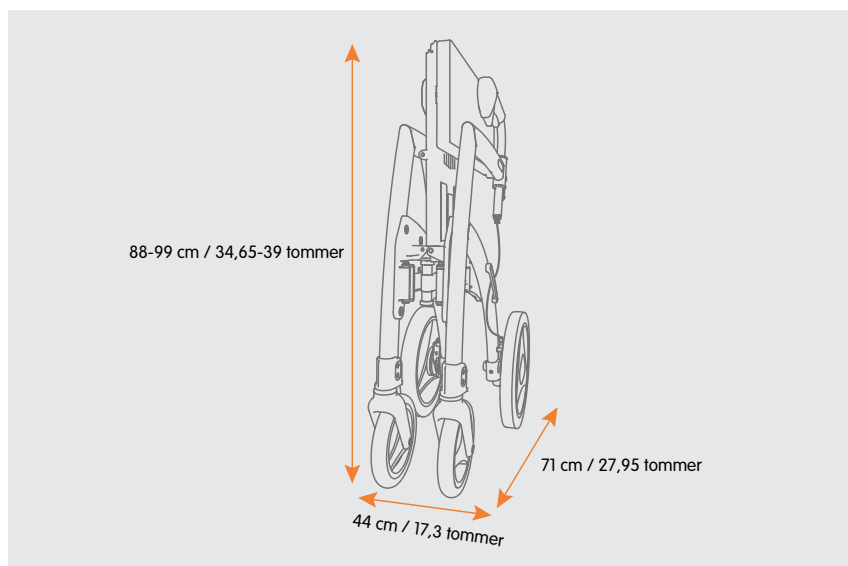

Figur 62: Så kompakt er den sammenfoldede Rollz Motion Electric.

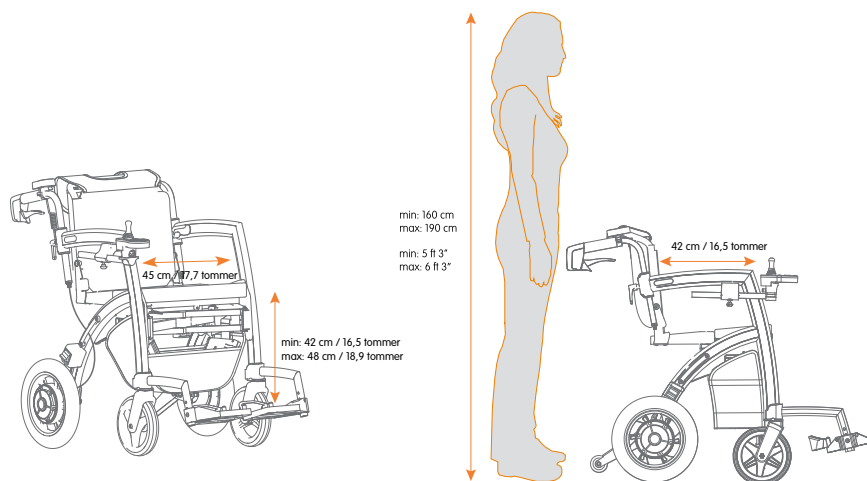

Figur 63: Ergonomiske dimensioner af Rollz Motion Electric elektrisk kørestol.

ERGONOMISKE DIMENSIONER

	Rollz Motion Electric
Maksimum brugervægt	100 kg
Minimum og maximum højde på brugeren og skubberen	Ca. 1.60 – 1.90 m
Sædet rollator H x D x B	55 x 20 x 45 cm
Sædet elektrisk kørestol H x D x B	55 x 42 x 45 cm
Højde håndtag rollator	88-89 cm
Højde håndtag elektrisk kørestol	84-96 cm
Afstand mellem håndtag	44.5 cm

TEKNISKE DETALJER

	Rollz Motion Electric
Motor	DC24V250W/2
Motorkraft	2*250 W
Batteritype	Li-ion
Batterikapacitet	12,5 Ah
Batteri nominel spænding	24 V
Oplader og maksimal udgangsstrøm	AC100-240 V 50-60 Hz og 2 A udgang
Styringens maksimale udgangsstrøm	40 A, kørestrøm 2-3A

FEJLKODER OG LØSNINGER

En fejlkode kan vises, når der opstår en fejl. Dette indikeres, når 'EE' vises på LCD-skærmen. Under 'EE' vil den specifikke fejlkode blive vist. Find fejlkoden nedenfor for at læse den anbefalede løsning.

FEJLKODELISTE		
Fejlkode	Årsag til fejl	Løsning
E0002	Fejl i venstre motor	Kontroller, om venstre motorkabel og stik er beskadiget. Hvis beskadiget, kontakt forhandleren for at udskifte ødelagte dele. Hvis stikkontakten eller kablet ikke er beskadiget, skal du kontrollere, om det venstre motorkabel er sat ordentligt i. Hvis dette er korrekt indsat, skal du kontakte forhandleren for at se nærmere på denne fejlkode.
E0004	Højre motorfejl	Kontroller, om det rigtige motorkabel og stik er beskadiget. Hvis beskadiget, kontakt forhandleren for at udskifte ødelagte dele. Hvis stikkontakten eller kablet ikke er beskadiget, skal du kontrollere, om det rigtige motorkabel er sat ordentligt i. Hvis dette er korrekt indsat, skal du kontakte forhandleren for at se nærmere på denne fejlkode.
E0008	Fejl ved registrering af venstre motorstrøm	Kontakt producenten for at udskifte de ødelagte dele.
E0010	Højre motorstrømregistreringsfejl	Kontakt producenten for at udskifte de ødelagte dele.
E0020	Registrering af batteristrøm er forkert	Kontakt producenten for at udskifte de ødelagte dele.
E0040	15V spændingsfejl	Kontakt producenten for at udskifte de ødelagte dele.
E0800	Forreste kontrolkommunikationsfejl	Kontroller, om kabler og forbindelser er korrekt tilsluttet, se Kabler og forbindelser (Ugentligt) . Hvis tilsluttet korrekt, kontakt producenten for at udskifte de ødelagte dele.
E-021	Kommunikationsfejl på bagsiden	Kontakt producenten for at udskifte de ødelagte dele.
E-023	Attitudesensor unormalt	Kontakt producenten for at udskifte de ødelagte dele.
E-024	Kalibrering af køretøjets holdning	Sørg for, at styret er i skubbestøtteposition. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede, indtil du hører en stemmemeddelelse, slip knappen og hold Rollz Motion Electric stationær, indtil 00001 forsvinder fra skærmen.
E-025	Fejl ved grebsdetektering	Kontakt producenten for at udskifte de ødelagte dele.
E-026	Fejl ved grebsdetektering	Kontakt producenten for at udskifte de ødelagte dele.
E-027	Touchpanelet unormalt	Kontakt producenten for at udskifte de ødelagte dele.

TILBEHØR

Funktionaliteten af Rollz Motion Electric kan udvides ved at bruge tilbehør som rejsecover, paraply, bælte, kopholder og fleksibel rygstøtte. Brug kun originalt eller Rollz International BV godkendt tilbehør. Nyt tilbehør udgives jævnligt. Besøg www.rollz.com eller spørg din leverandør om nyt tilbehør.

VEDLIGEHOLDELSE

Regelmæssig vedligeholdelse forlænger levetiden og øger sikkerheden på din Rollz Motion Electric. Lad kun autoriserede Rollz-forhandlere udskifte eller reparere dele, der er slidte, beskadigede eller ødelagte.

Rengøring/desinfektion

Rengør din Rollz Motion Electric ofte for at holde den i optimal stand:


- a. Rengør rammen og håndtagene med lunkent vand og en klud. Tør din Rollz Motion Electric grundigt efter rengøring. For mere modstandsdygtige pletter kan du bruge et mildt rengøringsmiddel.
- b. Undgå overdreven vandkontakt med bevægelige dele, såsom aksler og hængselpunkter.
- c. Rollatorens håndtag, kørestolspakkens håndtag og armlænene må ikke desinficeres med et alkoholbaseret desinfektionsmiddel. Dette vil beskadige materialet. Rengør disse dele med varmt sæbevand. Sørg for at tørre alt for at forhindre korrosion.
- d. Hjulene kan rengøres med lunkent vand og en børste med plastikbørster. Brug ikke en stålbørste, da det kan beskadige din Rollz Motion Electric.
- e. BFor Rollz Motion Electric videregives til en ny bruger, skal den desinficeres.
- f. Skyl ikke de elektriske dele med vand. BEMÆRK: Når batteriet er kommet i kontakt med vand, skal du slukke produktet helt, før du fjerner batteriet, og du må ikke bruge Rollz Motion Electric, før du har tørret batteriet. Når Rollz Motion Electric er helt tør, kan du udskifte batteriet.

BEMÆRK


Brug ikke et alkoholbaseret desinfektionsmiddel.

Frakobling af batteriet


Sluk for systemet, træk parkeringsbremsen, lad ikke en person sidde i kørestolen og placer Rollz Motion Electric på en flad overflade, før du fjerner batteriet. Find batterikablet og frakobl batterikablet ved at dreje metalringen på stikket mod uret. Du kan finde batterikablet i kurven under sædet. Efter frakobling af kablet kan du pakke velcrobåndene ud for at tage batteriet ud.

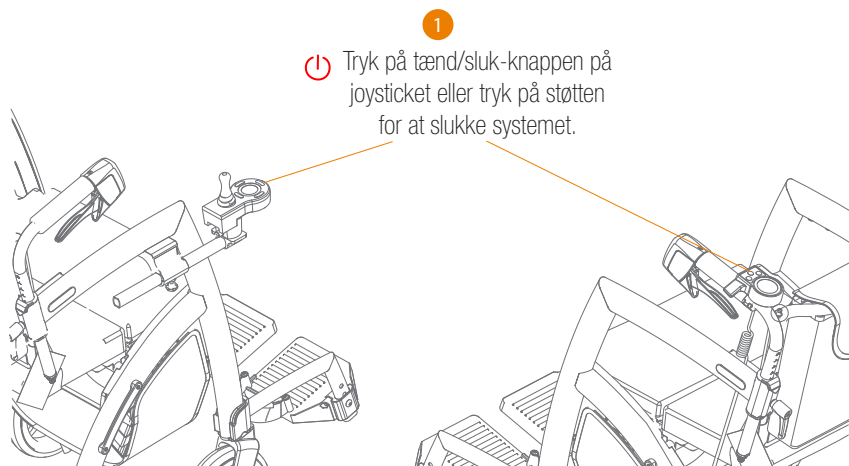

Figur 64: Sluk for systemet, før du fjerner batteriet.

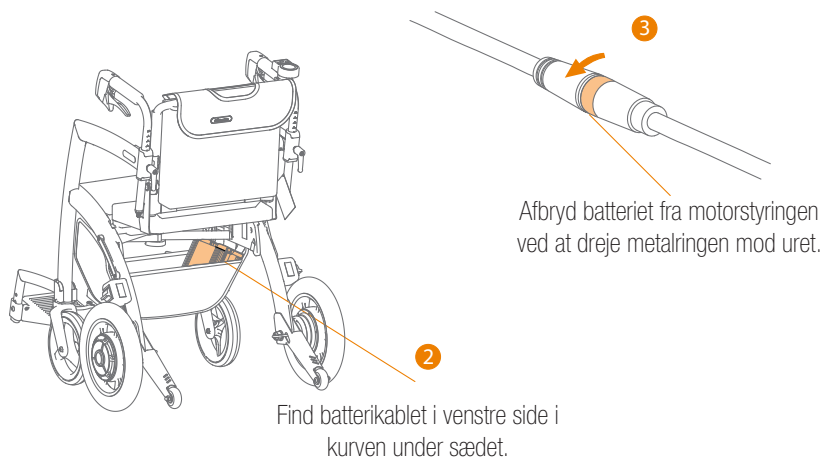

Figur 65: Find og afbryd batteriet.

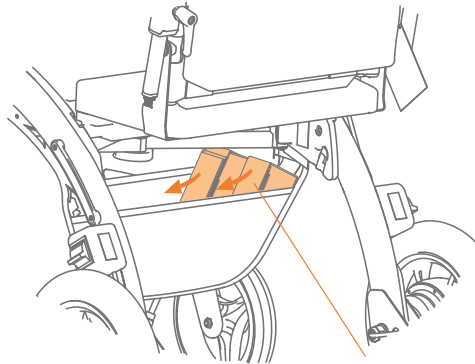


Pak velcroremmene ud.

4

Figur 66: Pak batteriet ud.

Gentilslutning af batteriet

Læg batteriet i posen med kablet pegende nedad. Vikl velcro-strimlerne rundt og stram disse godt. Find batterikablet og tilslut det til batteriet ved at dreje metalringen på stikket med uret. Du kan finde batterikablet i kurven under sædet. Efter at have kontrolleret kabelforbindelsen kan du tænde for systemet igen og teste systemets funktionaliteter.

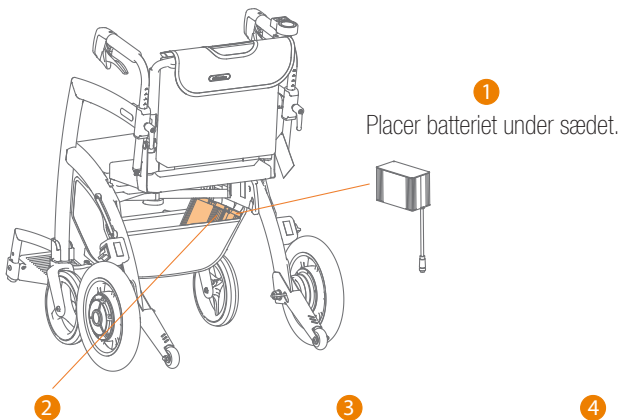

Placer batteriet under sædet.

2

Genplacer velcro-stropperne, og tilslut dem igen med motorstyringen.

3

Tryk på tænd/sluk-knappen, og tænd for systemet igen.

4

Tjek alle funktioner.

Figur 67: Tilslut batteriet igen.

Opbevaring af Rollz Motion Electric

Opbevar altid din Rollz Motion Electric i et rent, tørt og støvfrit miljø.

Opbevar ikke din Rollz Motion Electric i et miljø, hvor den kan komme i direkte kontakt med vand; temperaturer lavere end -5 °C / 23 °F og højere end 45 °C / 113 °F; med meget høj luftfugtighed.

Batterivedligeholdelse (dagligt)

Kontroller den resterende batterikapacitet. Hvis batteriet når slutningen af dets levetid og bør udskiftes, bedes du kontakte leverandøren eller en autoriseret Rollz-forhandler.


Batteriets levetid og ydeevne afhænger af temperatur, batteristatus og brugervægt. Efterhånden som batteriet ældes, kan der opstå et tab af kapacitet (hvis der er et betydeligt tab af rækkevidde eller opladning af produktet tager betydeligt længere tid). I dette tilfælde anbefaler vi at udskifte batteriet ved at kontakte forhandleren.

Før brug skal du kontrollere, at batteriet er fuldt opladet. Den normale opladningstid for batteriet er omkring 5 timer. Når batteriet er helt tomt, kan opladningstiden være op til 6 timer.

Hvis du ikke bruger batteriet i længere tid, skal du sørge for, at det oplades mindst hver 2. måned. Hvis batteriet ikke oplades i længere tid, kan det forårsage intern skade.

Kabler og forbindelser (ugentlig)

Kontroller de elektriske dele og tilslutningsledninger for korrekte forbindelser og for eventuelle skader. Selv den mindste skade kan føre til farlige situationer (f.eks. kortslutning) og skal repareres med det samme. Hvis den er beskadiget, kontakt venligst leverandøren eller få en autoriseret Rollz-forhandler til at reparere den. Reparer det ikke selv. Kontroller, om forbindelserne er blevet fastgjort i henhold til **Figur 68**. Fjern eller afbryd ikke komponenter, mens det elektriske støttesystem er tændt.

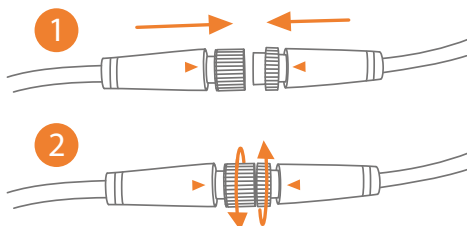

Figur 68: Sørg for, at stikkene er justeret korrekt og strammet, hvis det er relevant.

Motorer (hver måned)

Undersøg motorerne i baghjulene for synlige revner eller deformationer, tjek om hjulene kan rotere frit og tjek for øget støj under brug. Kontroller, at møtrikkerne og andre fastgørelsesanordninger, der fastgør motorerne til rammen, er spændt korrekt og ikke har slør. Brug ikke Rollz Motion Electric, hvis nogen af disse problemer er blevet bemærket. Kontakt leverandøren eller en autoriseret Rollz-forhandler.


Push support controller og joystick controller (hver 3. måned)

Rengør forsigtigt controlleren og joysticket med en klud fugtet med et neutralt fortyndet rengøringsmiddel. Brug aldrig slibende materialer eller alkoholholdige rengøringsmidler til rengøring. Beskyt kontrolenhederne mod beskadigelse under transport af kørestolen. Undgå altid, at væsker trænger ind i åbningerne på regulatorerne.

Vask sædebetræk

Betrækket til sædehynden kan vaskes. Fjern altid inderpuden før vask.

- a. Træk velcroen på hyndens betrækket af fra sædet (**Figur 69**).
- b. Luk betrækket op og fjern inderpuden.
- c. Betrækket er nu klar til vask i vaskemaskinen ved en maksimal temperatur på 30 °C / 86 °F
- d. Tør blot dækslet i luften, ikke i tørretumbleren.
- e. Sæt inderpuden tilbage i betrækket og lynlås sædet.
- f. Placer puden tilbage på sædet.

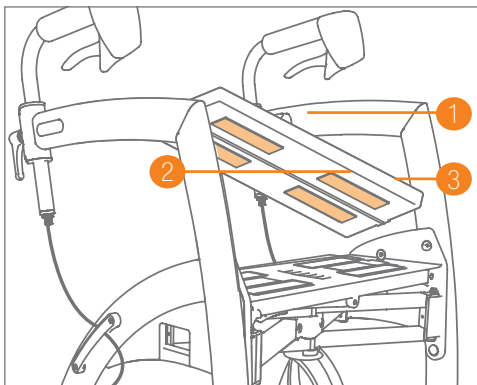

Figur 69: Fjernelse af sædehynden fra rollatoren.

BEMÆRK

Betrækket må aldrig bleges eller kemisk renses, og det må ikke stryges.

Hvad er hvor?

1. Sædehynde
2. Velcro
3. Lynlås


Bremseydelse (dagligt)

Tjek bremseevnen. Når bremserne er i brug, bør hjulene på Rollz Motion Electric stoppe. Hvis hjulene ikke stopper, når du bruger bremsen: Sluk straks systemet, kontroller for skader og prøv at justere bremserne i henhold til forklaringen nedenfor. Kontakt leverandøren, hvis bremserne er beskadigede, eller når bremseevnen ikke tillader Rollz Motion Electric at stoppe efter justering. Reparer ikke bremserne selv.


Justering af bremser

Ved at bruge Rollz Motion Electric kan bremserne slides. Som følge heraf kan det være nødvendigt at efterjustere bremserne. Når bremserne er korrekt justeret, forebygger du problemer og kan udnytte dem optimalt. Tjek bremserne regelmæssigt, helst før hver brug. Når Rollz Motion Electric har parkeringsbremserne aktiveret, bør hjulene ikke dreje. Når håndbremserne slippes, bør Rollz Motion Electric ikke bremses.

Hvis bremserne ikke fungerer korrekt, kan de justeres på to måder: i toppen og bunden af bremsekablet (**Figur 70**). Justeringen i toppen af bremsekablet (lige under højdejusteringshåndtaget) er til finjustering, så bremsens ydeevne kan indstilles lidt strammere. Justeringen i bunden af bremsekablet (nær baghjulene) er for en mere radikal justering. Sørg for, at både venstre og højre bremse er korrekt justeret.

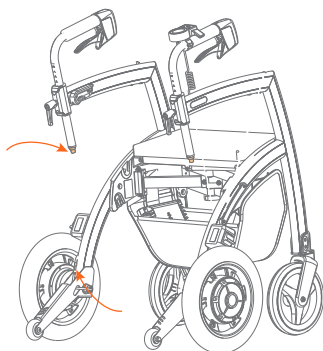

Figur 70: Bremsejustering via justeringsskruerne i toppen og bunden af bremsekablet.

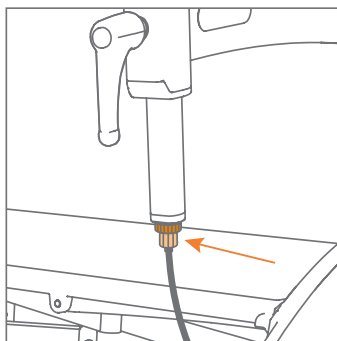

Figur 71: Bremsejustering via justeringsskruen, lige under låseringen.

Bremsejusteringer i toppen af bremsekablet

Du kan stramme bremserne ved at bruge bremsejusteringen øverst.

- a. Rollz Motion Electric må ikke være på parkeringsbremserne, mens bremserne justeres.

- b. Løsn først låseringen (træk kablet ned for at gøre det lettere). Dette giver dig plads til at stramme eller løsne justeringsskruen under den **(Figur 71)**.
- c. Spænd låseringen igen og kontroller, om bremsen giver den ønskede bremsekraft.
- d. Gør det samme på den anden side og tjek om begge bremses giver samme modstand.

Bremsejusteringer i bunden af bremsekablet


Hvis du har brug for at stramme bremserne mere, end hvad topjusteringen tillader, kan du justere yderligere ved hjælp af bundbremsejusteringen.

- a. Rollz Motion Electric bør ikke være på parkeringsbremserne, mens du justerer bremserne.
- b. Bliv bagerst på Rollz Motion Electric, når du justerer bremserne. Løsn låseringen i bunden af bremsekablet (træk kablet op for at gøre det lettere). Drej justeringsskruen over den for at forkorte eller forlænge bremsekablet **(Figur 72)**. Drej med uret for mere bremsekraft og mod uret for mindre bremsekraft.
- c. Når bremsen har den ønskede kraft, spændes låseringen.
- d. Gør det samme på den anden side.
- e. Kontroller, om bremsekraften på venstre og højre side er jævnt fordelt.



ADVARSEL

Hvis bremserne ikke fungerer korrekt efter justering af dem, skal du kontakte din leverandør med det samme og brug ikke Rollz Motion Electric.

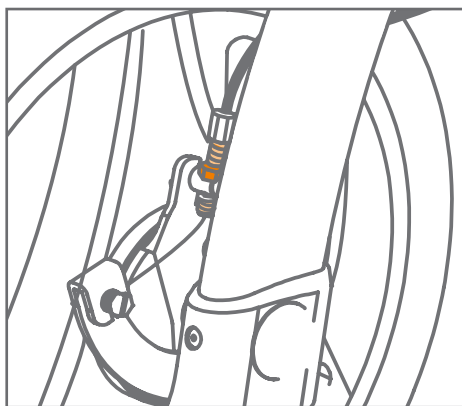


Figur 72: Bremsejustering via låseringen (mørk orange) og justeringsskruen.

Pumpning af de pneumatiske dæk (ca. hver måned)

Rollz Motion Electric har pneumatiske baghjul. Disse pneumatiske dæk skal forsynes med ekstra luft regelmæssigt for optimal brug (Figur 73). De indvendige slanger er udstyret med Schrader-ventiler, også kendt som bilventiler. Medbring altid den medfølgende pumpe på vejen for at bruge den, hvis det er nødvendigt. Den passer i tasken til kørestolspakken.

Omkring to pumper pr. bånd er normalt nok til at få det anbefalede tryk. Bagdækkene skal have et maksimalt tryk på 2,5 bar ($\approx$ 2,5 atmosfærer eller 36,3 PSI / eller 250 kPa). Fordækkene skal have et maksimalt tryk på 4,5 bar ($\approx$ 4,5 atmosfærer eller 65,3 PSI eller 450 kPa).

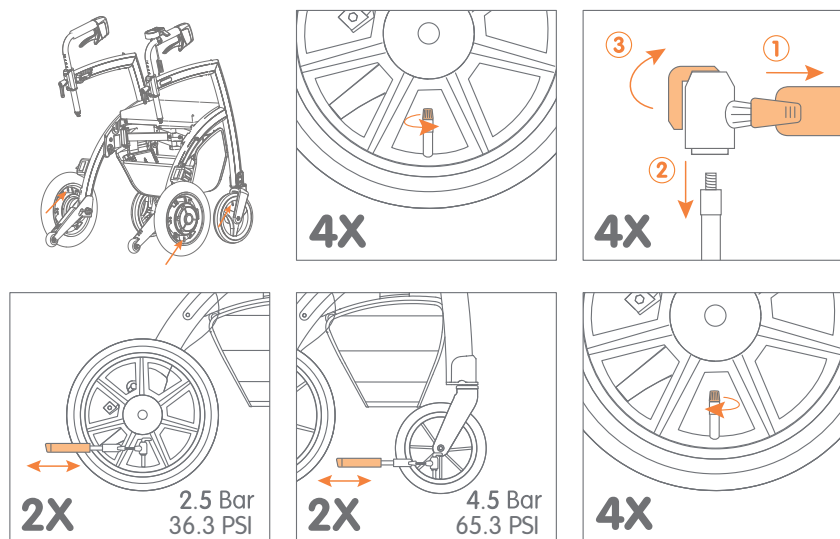

Figur 73: Pumpning af de pneumatiske dæk.



ADVARSEL

Pump ikke dækkene op over det anbefalede tryk, da de kan eksplodere under højt tryk.

BEMÆRK

Tjek ofte, om dækkene er pumpet op til det anbefalede tryk. Hvis dækkene er for

Flade dæk

Sluk omgående systemet, og brug ikke Rollz Motion Electric, hvis et dæk er fladt, punkteret eller ødelagt. Kontakt leverandøren eller autoriserede Rollz-forhandlere for at udskifte dækket.

Udskiftning af dele

Bærbare dele, såsom skumhåndtag, dæk, hjul, bremsekabler og sædehynden, er udsat for slitage. Kontakt venligst din leverandør for udskiftning af dele, hvis det er nødvendigt.

BEMÆRK

Brug kun originale eller Rollz International BV godkendte dele.

GARANTI

Er der noget galt med din Rollz Motion Electric inden for to år efter købet? Så kontakt din leverandør med det samme. De vil søge en løsning så hurtigt som muligt i samråd med Rollz International. Vi anvender garantibestemmelserne nedenfor.

Reparationer er også mulige efter garantiperiodens udløb, mod godtgørelse af afholdte omkostninger. Kontakt venligst din forhandler direkte for dette.

Garantibestemmelser

Rollz® International BV, etableret i Delft i Holland (herefter "Rollz") i sin egenskab som producent, garanterer Rollz Motion Electric (herefter: "produkt") er produceret under følgende bestemmelser:

1. Den generelle garantiperiode for den første ejer (herefter: "kunden") er 24 måneder fra købsdatoen.
2. Rollz giver fem års garanti fra købsdatoen på materiale- og konstruktionsfejl på rammen ved normal brug og vedligeholdelse.
3. Batteriet er under garanti i en periode på 18 måneder.
4. Det elektriske støttesystem, undtagen batteriet, er under garanti i en periode på 24 måneder.
5. Garantien giver ret til at reparere, udtrykkeligt ikke at bytte eller tage et produkt tilbage.

- 6.** Ved reparation sørger kunden for transporten af produktet til og fra butikken, hvor det er købt ("leverandøren"). Leverandøren sørger for reparationen i samråd med Rollz.
- 7.** Garantien kan kun gøres gældende, såfremt kunden giver leverandøren en kopi af købskvitteringen med købsdato og en tydelig beskrivelse af reklamationerne samt det defekte produkt.
- 8.** Rollz sørger om nødvendigt for transporten af produktet fra leverandøren til Rollz og omvendt for egne omkostninger og risiko, dog kun såfremt reparationen er dækket af garantien.
- 9.** Garantiperioden forlænges aldrig, heller ikke ved reparationer.
- 10.** Garantien kan ikke overdrages og kan derfor kun påberåbes af den første ejer.
- 11.** Garantien påvirker ikke de rettigheder, som kunden har i henhold til loven.

Garantien gælder ikke i følgende situationer:

- a.** hvis kunden har foretaget eller bestilt ændringer eller reparationer uden forudgående skriftlig tilladelse fra Rollz eller leverandøren;
- b.** når defekter er forårsaget af forsømmelse eller en ulykke og/eller brug eller vedligeholdelse, andet end hvad der er angivet i manualen;
- c.** hvis serienummeret er beskadiget eller fjernet;
- d.** hvis skaden på produktet er et resultat af normal slitage.

Registrer din Rollz Motion Electric

Registrer dit produkt hos Rollz International ved at udfylde onlineformularen på www.rollz.com. Sørg for at indtaste serienummeret på Rollz Motion Electric. Dette nummer kan findes på mærkaten på sædet (under puden). Ved tilmelding kan du også tilmelde dig et e-mail nyhedsbrev for at holde dig orienteret om Rollz produktnyheder.

KONTAKT

Rollz International er altid opsat på at forbedre sine produkter yderligere, så derfor er vi interesserede efter din mening. Det kan handle om brugen af produktet, manualerne eller andre aspekter.

Send venligst dine tips eller erfaringer til: info@rollz.com.

Eller kontakt os for andre spørgsmål eller kommentarer, du måtte have:

Rollz® International BV

Rotterdamseweg 402M
2629HH Delft
The Netherlands

+31 (0)20 362 20 10
info@rollz.com
www.rollz.com

Authorized distributor Sweden-Denmark-Norway-Finland and Iceland:

Hjälpmedelsteknik Sverige AB

Tenngatan 2-4
SE 234 35 Lomma
Sverige

+46-40-41 07 80
info@hjalpmedelsteknik.se

rollz®



rollzint



RollzInternational



rollzint



RollzInternational

Version 2023.02