

Samlevejledning

Eagle rollator (215175)



Sådan samler du din nye rollator




1.
Fjern den røde elastik, der holder stellet (A) sammen. Fold stellet ud og tryk ned på sædet til du hører et klik fra sikkerhedslåsen under sædet.




2.
Læg nu stellet ned og monter de to baghjul (B1+ B2) på stellet, så selve hjulet sidder på ydersiden af stellet. Fastgør ved at stramme håndtaget.



3.
Vend herefter stellet om og monter forhjulene (C1+ C2). Løft hvert hjul op, drej 180 grader og tryk ned, til der lyder et lille klik.

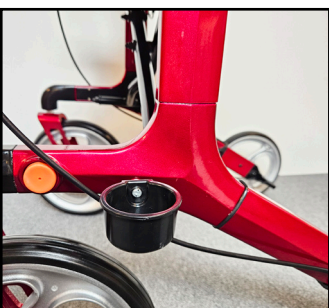

4.
Klik stokkeholderen (D) fast på venstre side af stellet med et let tryk.

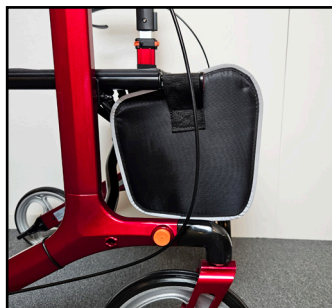

5.
Placér tasken (E) forrest på rollatoren, så den hænger i de to stropper, der er fastgjort på hver side af tasken. Se foto for korrekt montering.



6.
Fastgør afslutningsvis rygstøtten (F) under håndtagene ved hjælp af et glidebeslag. Obs! Den polstrede del af rygstøtten skal vende ind mod sædet.