


# Samlevejledning

Crane rollator (215200)



## Sådan samler du din nye rollator

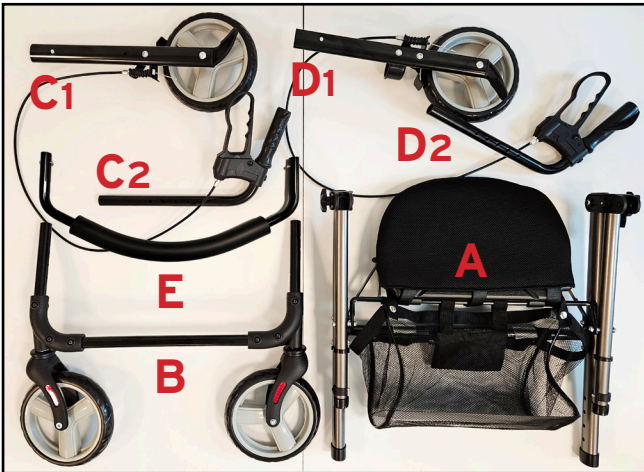

**1.**  
Fold stellet (A) ud. Skub de to U-clips på bøjlen med forhjul (B) ud og skub bøjlen ind i stellet. Juster til den rette højde og lås med U-clips.




**2.**  
Sådan ser det ud, når bøjlen med forhjul er korrekt monteret.



**3.**  
Vend stellet (A) om og isæt C1, så hjulet sidder på ydersiden af stellet. Juster højden, så den passer til forhjulenes højde.



**4.**  
Skrue stjernegrebet på stellet (A) ud og isæt håndtag (C2). Juster til ønsket højde og skru stjernegrebet i. Grebet må ikke overstrammes. Gentag punkt 3 og 4 med D1 og D2.

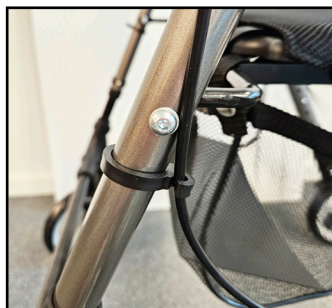

**5.**  
Før bremsekablet ind i den lille plastikholder på stellet, for at holde dette på plads.



**6.**  
Klik rygbøjlen (E) i den forreste del af stellet (A).

Du har nu samlet din nye Crane rollator, der er klar til brug.