


Samlevejledning

Ibis rollator (215350)



Sådan samler du din nye rollator

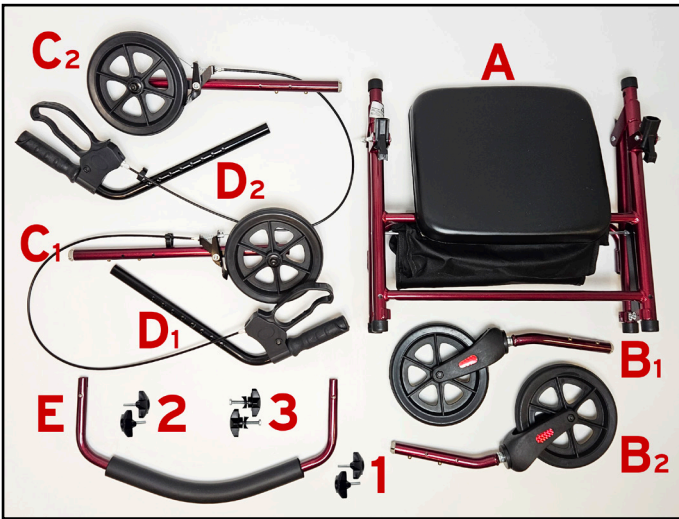

1. Fold stellet (A) ud. Sørg for at det tværgående led er trykket helt ned.



2. Læg stellet ned og indfør de to forhjul (B1 + B2) i stellet i ønsket højde - der er 2 muligheder. Fastgør med stjernegreb (1).



3. Vend herefter stellet om og monter baghjulene (C1 + C2) i samme højde som forhjulene. Fastgør med stjernegreb (2).



4. Stil rollatoren op på alle 4 hjul og monter begge håndtag (D1 + D2) i den rette brugerhøjde. Fastgør ved hjælp af beslag med stjernegreb (3).



5. Klips plastikbøjlen fra bremsekablet fast på stellet, så kablet holdes på plads.



6. Fastgør afslutningsvis rygstøtten (E) ved at føre den ind i beslaget med vippefunktion, der er fastgjort på stellet.

Rollatoren er nu samlet.